

# UROMED FÜLLMEDIUM

## REF 1550

Bringen Sie Konstanz in die Ballons Ihrer Silikon-Katheter!


*Create constancy in the balloons of your silicone catheters!*

### Luer-Spritze mit Füllmedium zum Blocken von urologischen Kathetern

- enthält 10 % Glycerin in aqua dest.
- hält das Füllvolumen konstant
- erleichtert die Katheteranlage
- latexfrei

### Filling Medium for inflating urological balloon catheters

- contains 10 % glycerine in aqua dest.
- keeps the filling volume constant
- easier application of catheters
- free of latex

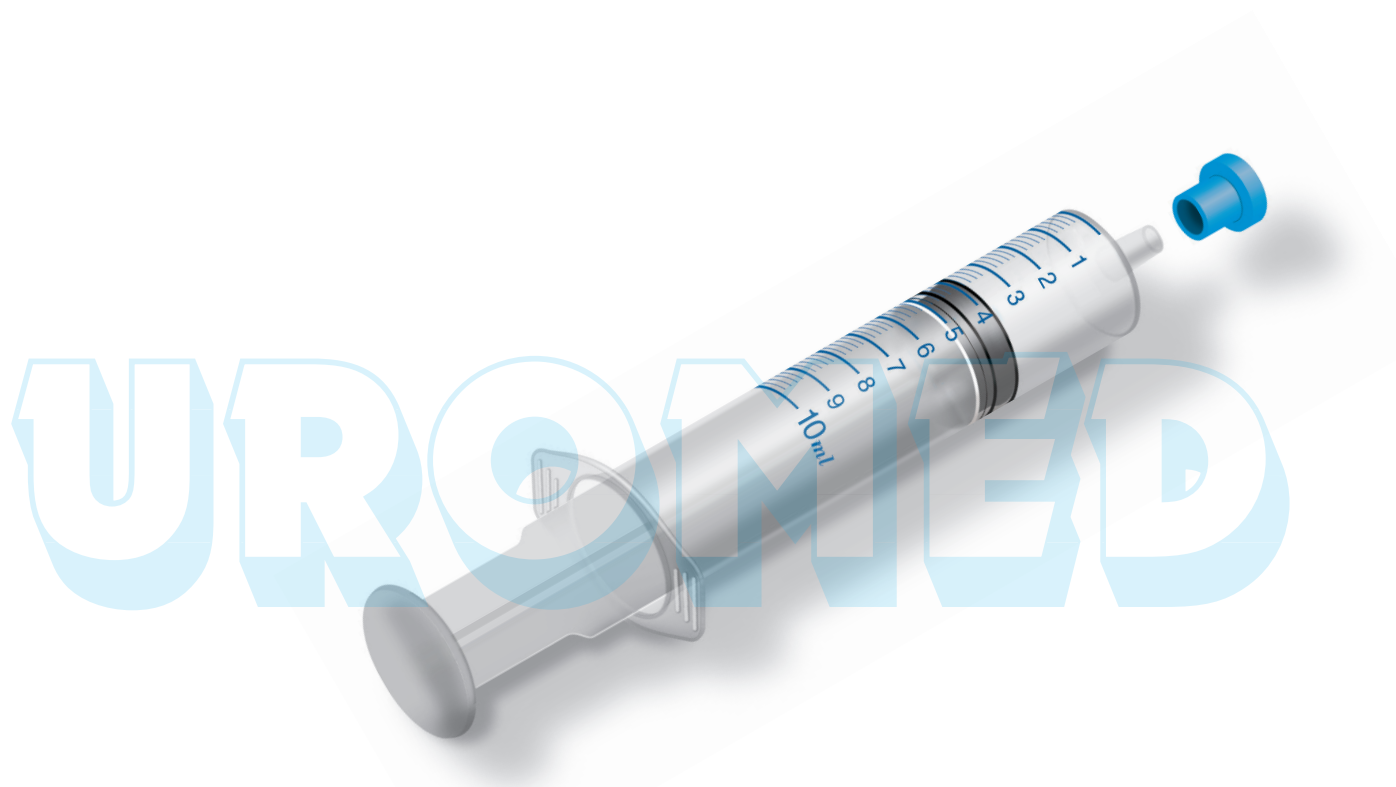

REF REF	Volumen Volume	PZN PZN
1550-05	5 ml	00730833
1550-10	10 ml	00730827

Hilfsmittelkatalog: 15.99.99.0006

**Verpackung:** steril  
**Original-Karton:** 10 Stück  
**Packing:** sterile  
**Original carton:** 10 pieces

### Diffusion bei Silikon-Ballon-Kathetern

Die Ballons der Silikon-Katheter lassen allgemein materialbedingt eine Diffusion zu. Dabei erfolgt ein Ausgleich der Konzentrationen der Flüssigkeit im Ballon und dem Harn in der Blase, der Ballon kann sich langsam entleeren. Das gilt im Besonderen für Nephrostomie- und suprapubische Ballon-Katheter mit geringem Füllvolumen. Das UROMED-Füllmedium hilft durch das enthaltene Glycerin eine Diffusion effektiv zu reduzieren.

### Diffusion by Silicone Balloon Catheters

*The balloons of the silicone catheters in general allow a diffusion caused by the material. As a result a balance of the concentrations of the liquid in the balloon and the urine in the bladder takes place, the balloon probably might evacuate slowly. This applies especially to nephrostomy and suprapubic balloon catheters with a small filling volume. The UROMED filling medium helps to reduce any diffusion effectively due to the glycerin.*

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE