



Schürmann Transportgeräte GmbH

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARM WASSER LÖSLICHE PLASTIK SÄCKE

ANWEISUNG ZUR LAGERUNG

- Kühl und trocken lagern bei 7° C bis 30° C; relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %.
- Nach Entnahme eines Sackes die restliche Säcke in der PE-Verpackung aufbewahren
- Die Säcke innerhalb von 12 Monaten nach Anschaffung gebrauchen

ANWEISUNG ZUM GEBRAUCH

- Gebrauchte / schmutzige Wäsche in den Sack platzieren
- Feuchte / nasse Wäsche erst in trockene Wäsche einwickeln, um den direkten Kontakt zwischen nass-feuchter Wäsche und Beutelinneren zu vermeiden
- Das Berühren der Säcke mit nassen Händen vermeiden – Handschuhe tragen
- Nicht überfüllen: Maximal bis zu 75 % befüllen
- Den Sack mit dem rosa Verschlussband verschließen; SACK NICHT VERKNOTEN
- Den Sack in einen wiederverwendbaren Wäschetransportsack platzieren
- Den Sack während der Lagerung und des Transportes trocken halten
- Den Sack ungeöffnet in die Waschmaschine legen
- Der rosa Verschluss löst sich während des ersten kalten Spülens auf
- Der Sack löst sich nach min. 10 Minuten waschen mit ausreichendes Wasservolumen bei 65° C restlos auf



Schürmann Transportgeräte GmbH

Münsterstraße 58 / D – 48683 Ahaus-Alstätte / www.s-tg.de