

ANWENDUNGSHINWEISE: Hyiodine® HA Fluid

1. Standardmäßige Reinigung der Wunde
2. Entfernung des weißen Deckels von der Oberseite der Hyiodine® HA Flasche, Desinfektion des grauen Gummistopfens. Silbernen Aluminium-Ring in seiner Position belassen (nicht entfernen).
3. Transparente Schutzkappe des Mini-Spikes entfernen. Sterile Nadelspitze mittig durch den Gummistopfen stechen.
4. Weiße Kappe vom oberen Teil des Mini-Spikes entfernen. (Achtung: Herausziehen des Mini-Spikes verhindern).
5. Entnehmen des Fluids mittels steriler Spritze am Adapter des Mini-Spikes - benötigte Menge langsam aufziehen.



6. Applikation des Hyiodine® HA Fluids:
 - Fluid direkt in tiefe, unebene oder unterminierte Wunden applizieren.
 - Fluid mittels durchtränkter, steriler Komresse als Abdeckung (oberflächliche Wunden) oder Drainage/Tamponade (tunnelartige Wunden) anwenden.



Wundgröße	Empfohlene Fluid-Menge
5 x 5 cm	2 ml
7,5 x 7,5 cm	5 ml
10 x 10 cm	7-8 ml

7. Hyiodine® HA Fluid auf oder in die Wunde bringen und mit einem geeigneten Sekundärverband (zur Aufnahme des Wundexsudates) abdecken und fixieren.
8. Erneuerung der mit Hyiodine® HA Fluid durchtränkten Komresse, Tamponade, Drainage

Nicht – Infizierte Wunde:	alle 3 Tage
Infizierte Wunde:	alle 2 Tage
9. Adapter des Mini-Spikes mit weißer Schutzkappe verschließen. Angebrochene Hyiodine® HA Flasche im Kühlschrank aufbewahren. Das Fluid bleibt bis zu 6 Wochen steril und einsetzbar. Weitere Informationen unter: www.contipro.de



Produkt	Art und Größe	Art.-Nr.	PZN
Hyiodine® HA Fluid	22g - Flasche	150015	16764805
Hyiodine® HA Fluid	50g - Flasche	150016	16764834

Wichtig: Dieses Info-Blatt mit Anwendungshinweisen ersetzt nicht die mehrsprachig vorhandene Gebrauchsanweisung (Instruction for Use) des Produktes, die sich in jeder Produktverpackung befindet.