

MUND-NASEN-MASKE ANLEITUNG ZUM RICHTIGEN AN- UND ABLEGEN




HÄNDE 20 SEKUNDEN
GRÜNDLICH MIT
SEIFE WASCHEN



MASKE IMMER
ÜBER
NASE UND MUND ZIEHEN



BEIM TRAGEN
MASKE
NICHT MEHR BERÜHREN

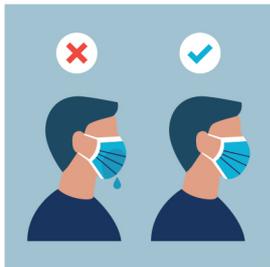

DURCHFEUCHTETE MASKEN
SOFORT
ABLEGEN UND AUSWECHSELN



NUR MIT HILFE
DER BÄNDER
ABLEGEN



AUSSENSEITE BEIM
ABNEHMEN NICHT
MEHR BERÜHREN



SOFORT IN DIE
WASCHMASCHINE GEBEN



HÄNDE 20 SEKUNDEN
GRÜNDLICH MIT
SEIFE WASCHEN



MASKE BEI 60° GRAD MIT
PULVERFÖRMIGEM
VOLLWASCHMITTEL
WASCHEN