



WICHTIG

- ▶ Wettersituation beachten und entsprechende Kleidung tragen!
- ▶ Sichtbarkeit bei Dunkelheit erhöhen (Licht, reflektierende Streifen)!
- ▶ Vor der Fahrt mit den Fahreigenschaften vertraut machen!
- ▶ Immer maximale Steigungen, Gefälle und seitliche Neigung beachten!
- ▶ Hindernisse im rechten Winkel überfahren!
- ▶ Am bergseitigen Wegrand fahren!
- ▶ Nässe und Glätte verschlechtern die Fahreigenschaften!
- ▶ Beachten, dass keine Körperteile/Kleider von den Rädern erfasst werden!



VORBEREITEN

Akku-Ladezustand kontrollieren

Höhe Fussbrett einstellen

Sicherungs-
gurte
anziehen

Armlehnen
einstellen

Höhe Räder
einstellen
(5 cm ab
Boden)


RADFREILAUF (beide Räder)

Deaktiviert

Rad angetrieben
(Fahrbereit)

Aktiviert

Rad dreht frei
(zum Verschieben)

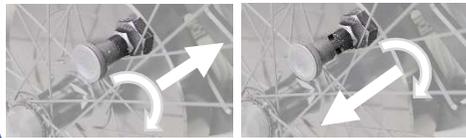

WEGFAHRSPERRE (Option)

Einschalten

- 1) Bedienpanel einschalten
- 2) Schlüssel *Wegfahrsperr*e einstecken (Vorderseite Bedienpanel)
- 3) Nach Piepton Schlüssel herausziehen
- 4) Wegfahrsperre ist eingeschaltet

Ausschalten

- 1) Bedienpanel einschalten
- 2) Schlüssel *Wegfahrsperr*e einstecken
- 3) Nach Piepton Schlüssel herausziehen
- 4) Rollstuhl ist wieder betriebsbereit



WICHTIG

- ▶ Wettersituation beachten und entsprechende Kleidung tragen!
- ▶ Sichtbarkeit bei Dunkelheit erhöhen (Licht, reflektierende Streifen)!
- ▶ Vor der Fahrt mit den Fahreigenschaften vertraut machen!
- ▶ Immer maximale Steigungen, Gefälle und seitliche Neigung beachten!
- ▶ Hindernisse im rechten Winkel überfahren!
- ▶ Am bergseitigen Wegrand fahren!
- ▶ Nässe und Glätte verschlechtern die Fahreigenschaften!
- ▶ Beachten, dass keine Körperteile/Kleider von den Rädern erfasst werden!



VORBEREITEN

Akku-Ladezustand kontrollieren

Höhe Fussbrett einstellen

Sicherungs-
gurte
anziehen

Armlehnen
einstellen

Höhe Räder
einstellen
(5 cm ab
Boden)

RADFREILAUF (beide Räder)

Deaktiviert

Rad angetrieben
(Fahrbereit)

Aktiviert

Rad dreht frei
(zum Verschieben)



WEGFAHRSPERRE (Option)

Einschalten

- 1) Bedienpanel einschalten
- 2) Schlüssel *Wegfahrsperr*e einstecken (Vorderseite Bedienpanel)
- 3) Nach Piepton Schlüssel herausziehen
- 4) Wegfahrsperre ist eingeschaltet

Ausschalten

- 1) Bedienpanel einschalten
- 2) Schlüssel *Wegfahrsperr*e einstecken
- 3) Nach Piepton Schlüssel herausziehen
- 4) Rollstuhl ist wieder betriebsbereit

FAHREN

EIN/AUS


Akku-Ladezustand

Fahren/Fussbrett verstellen


Geschwindigkeit

Stufe 1-5
Langsam/
Schnell

Vorwärts + steuern
(Fussbrett senken)

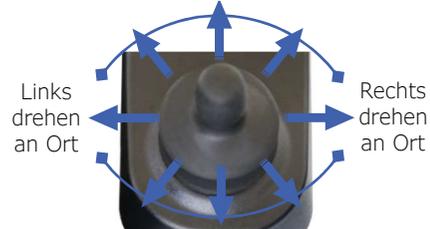

Rückwärts + steuern
(Fussbrett heben)

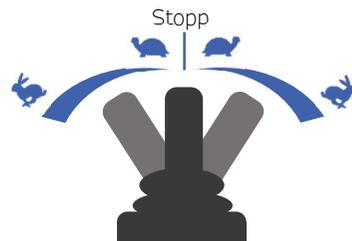

FAHREN

EIN/AUS


Akku-Ladezustand

Fahren/Fussbrett verstellen

Geschwindigkeit

Stufe 1-5
Langsam/
Schnell

Vorwärts + steuern
(Fussbrett senken)

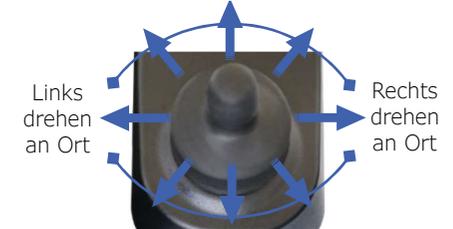

Rückwärts + steuern
(Fussbrett heben)

