



ITI – Innovative Technik Ilting
Laufrad Manufaktur
Josef Ilting
Brandstorstraße 14 45239 Essen
Tel. 0201/491236
Mobil 0171/2601527

HTL 20/12 LEOCHRIMA



Das Original Hightech Laufrad
zum Behinderungsausgleich.

Unser Produkt orientiert sich am
Menschen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse am LEOCHRIMA-Laufrad

KURZBESCHREIBUNG

- Das Fahren mit dem Laufrad ist denkbar einfach, das Laufrad weist für den Benutzer als Sitzfläche einen handelsüblichen Fahrradsattel auf.
- Das Laufrad wird im Sitzen benutzt und wird dabei durch das Abstoßen mit einem Fuß oder mit beiden Füßen auf dem Boden angetrieben.
- Auch für ungeübte Personen ist ein bequemes und funktionierendes Benutzen des Laufrades garantiert.

- Durch den tiefen Einstieg , wobei mit den Füßen jeder Zeit Bodenkontakt möglich ist, kann der Benutzer während der Fahrt die Füße auf das Trittbrett stellen.
- Der tiefe Schwerpunkt sorgt für ein stabiles und ruhiges Fahrverhalten, hinzukommt ein sehr gutes Abrollverhalten durch das vordere 20“ Rad und dem hinteren 12“ Rad und den somit stabilen Geradeauslauf.
- Das Laufrad ist ein robustes Bewegungsgerät mit einem geringen Unfallrisiko, so ergibt sich ein Höchstmaß an Fahrkomfort und Fahrsicherheit.
- Optimale Anpassung an den Laufradbenutzer durch die multifunktionalen Einstellmöglichkeiten der Lenkertechnik und der Spezial-Sattelkonstruktion.
- Hinzu kommt ein sehr wirksames V-Bremssystem für das Vorder- und Hinterrad.

EINSATZMÖGLICHKEITEN

- zur Mobilität im Nah- und mittlerem Fernbereich
- bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises
- für Menschen mit eingeschränkter Beinfunktion
- für Menschen mit motorischen Handicaps
- für Senioren
- für Menschen mit Wundfußsyndrom und Neuropathie
- für Menschen mit Diabetes

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

DIMENSIONEN

- Gesamtgewicht: ca. 13 kg
- Maximale Belastung: 80 kg
- Gesamtlänge: ca. 1350 mm
- Gesamtbreite: ca. 200 mm
- Lenkerhöhe: ca. 900 mm
- Lenkerbreite: ca. 600 mm
- Vorderrad: 20 Zoll
- Hinterrad: 12 Zoll

DPMA - Nr.: 20 2020 001 809

IK: 332514492

WICHTIGE INFORMATIONEN

Soweit Personen über einen Behindertenausweis verfügen, sollten sie diesen mit sich führen.


Das Mindestalter zum Führen des Laufrades beträgt 16 Jahre.

Es wird empfohlen, einen Schutzhelm zu tragen.

MÖGLICHES ZUBEHÖR & SATTEL

ABLAGE FÜR ORTHESEN- & PROTHESENTRÄGER

Die Fußkonsole FKS zum Absetzen des linken oder rechten Fußes eignet sich besonders für Personen mit eingeschränkter Beinfunktion, z. B. Beinprothesenträger oder anderer Beinbehinderungen, ein sinnvolles, wichtiges und komfortables Hilfsmittel. Die Fußkonsole lässt sich zur linken und rechten Seite vom Laufradtrittbrett herauschwenken. Man kann Sie auch in Neutralstellung unter dem Trittbrett belassen.

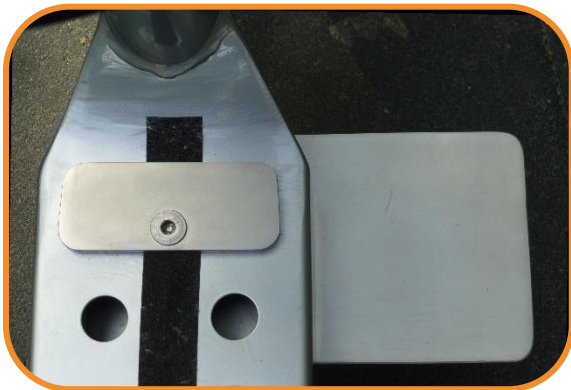

FÜHRUNGSSTANGE ZUM HALTEN DER BALANCE BEI KINDERN



Anpassung am Wachstum des Kindes durch neue Sattelstütze möglich.

GEPÄCKTRÄGER

Es ist möglich einen Adapter für einen Gepäckträger zu bestellen.

Das Rohr ist dabei genormt, um mit einer Vielzahl von potenziellen Gepäckträgern kompatibel zu sein:



ANGABEN ZUM SATTEL

Ein Sattel sollte vor Ort gekauft werden, da wir nicht für jede Gesäßform einen passenden Sattel liefern können. Beim Kauf eines passenden Sattels muss darauf geachtet werden, dass die verwendeten Materialien des Sattels die Forderungen der aktuellen ISO 10993-5 erfüllen und frei sind von toxischen Rückständen.



ITI - Innovative Technik Ilting
Laufrad - Manufaktur
Josef Ilting
Brandstorstraße 14
45239 Essen

Tel. 0201 / 49 12 36
Mobil 0171 / 260 15 27

kontakt@laufrad-ilting.de
www.laufrad-ilting.de