

Bedienungsanleitung

Face Shield / Gesichtsschutz-Visier



FACE-SHIELD
ONE

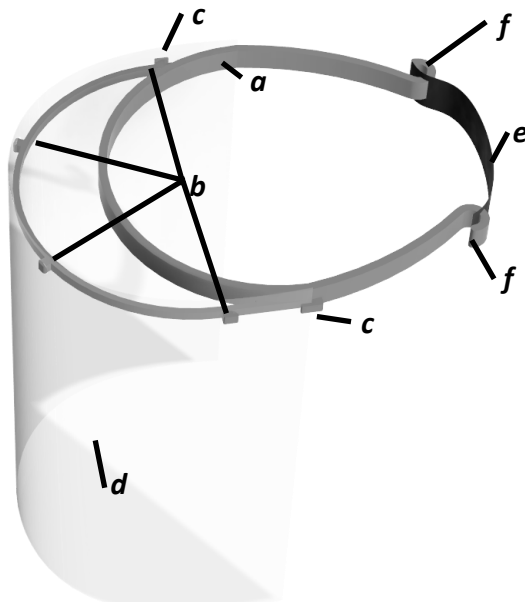


Abbildung Face Shield Version 1.1

- a Rahmen mit Stirnband und Visierhalter
- b Haltenasen für Visier
- c Gegenklemmung für Visier
- d Visier, Folie DIN A4
- e Lochgummiband
- f Bandhalterung

Herstelleranschrift:

Kunststoff-Plastik Müller GmbH
Ruiter Straße 13, 75245 Neulingen
info@kp-mueller-gmbh.de
+ 49 72 37 / 44 29 - 0



! WICHTIG! Zur Kenntnisnahme

- Das Face Shield ist kein medizinisches Produkt und kann für sich alleine keinen ausreichenden Schutz bieten.
- Sprechen Sie den Einsatz immer mit Ihrer verantwortlichen Fachkraft oder Beauftragten für Arbeitssicherheit ab.
- Wechseln Sie das Visier täglich, mindestens nach jedem Abnehmen des Face Shields.
- Der Rahmen kann und sollte mit handelsüblichem Desinfektionsmittel gereinigt werden.
- Der Rahmen sollte nicht länger als fünf Tage genutzt werden.
- Das Visier schützt nicht vor mechanischen oder anderen Einflüssen und kann nicht als Ersatz für Augen- und Gesichtsschutz bei Maschinen oder ähnlichem genutzt werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- Das Visier hat keine Schutzwirkung gegen Sonneneinstrahlung oder sonstige starke Lichteinflüsse.
- Achten Sie bei der Verwendung von Maschinen darauf, ob das Face Shield sich im Gefahrenbereich befindet. Wenden Sie sich ggf. an Ihre Fachkraft für Arbeitssicherheit.
- Das Visier kann bedingt das Sichtverhältnis verändern. Führen und bewegen Sie keine Fahrzeuge jeglicher Art mit angelegtem Face Shield.

Zusammensetzen und Anziehen

- Das mitgelieferte Visier wird mittels der 4 Löcher an den Haltenasen (b) des Rahmens (a) befestigt. Hierzu die gelochte Seite mit dem äußersten rechten Loch an der äußersten rechten Haltenase einfädeln und dann nach links auf die restlichen Haltenasen aufstecken.
- Die jeweiligen Folienenden unter die Gegenklemmung (c) schieben.
- Folie (d) auf festen Sitz prüfen.
- Das beigefügte Lochgummiband (e) in die linke Bandhalterung (f) einfädeln.
- Das Face Shield mit der Folieninnenseite zum Gesicht aufziehen und auf angenehmen Sitz ausrichten.
- Das Lochgummiband (e) mit der passenden Lochung an der rechten Bandhalterung (f) einfädeln, um einen sicheren und nicht verrutschenden Sitz des Face Shields zu gewährleisten.

Face Shield ONE ist ein Kooperationsprodukt von



und



Weitere Informationen unter www.FaceShieldONE.com