


## Applicazione della marca auricolare in ovini e caprini

**Per un'applicazione sicura delle marche auricolari Allflex, si consiglia l'impiego di una pinza per marche auricolari Allflex.**

La marcatura degli animali è un piccolo intervento chirurgico che richiede particolare attenzione e il rispetto di alcune regole. In caso contrario, in particolari circostanze possono verificarsi infezioni sulla ferita. Pertanto, durante la marcatura si devono osservare le seguenti misure:


### Marcatura di animali giovani

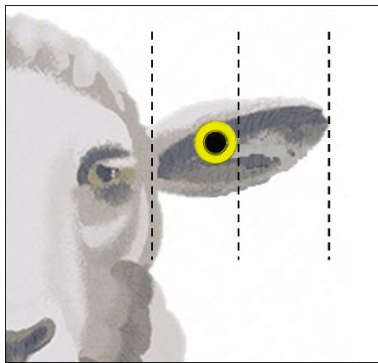

- > Immobilizzare bene gli animali.
- > Posizionare la marca auricolare al centro tra le due cartilagini.
- > Assicurarsi di non applicare la marca troppo vicino alla testa.
- > Subito dopo avere posizionato la marca, stringere velocemente la pinza con forza.
- > Ruotare l'elemento femmina e l'elemento maschio della marca nell'orecchio l'uno contro l'altro.
- > Disinfettare il punto di applicazione.

Se gli animali non vengono perfettamente immobilizzati e dopo la marcatura ritirano il capo bruscamente, possono verificarsi delle lesioni nel punto di applicazione.

### Marcatura aggiuntiva e rimarcatura degli animali adulti

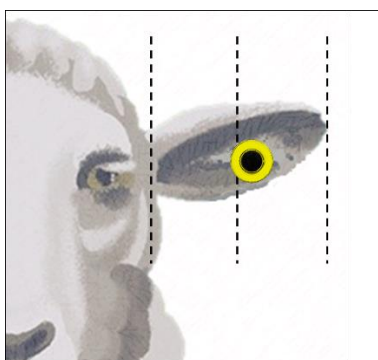

- > La marcatura è sostanzialmente uguale a quella degli animali giovani, con l'unica differenza che la marca auricolare deve essere posizionata più esternamente.
- > Le orecchie degli animali adulti hanno uno spessore maggiore. Se le marche auricolari vengono applicate vicino alla testa, la chiusura diventa troppo stretta e può causare una necrosi dei tessuti.
- > Pertanto, negli animali adulti le marche auricolari devono essere applicate il più possibile esternamente (almeno da 1/2 a 2/3 partendo dalla base dell'orecchio).

Dopo la marcatura si devono eseguire controlli ripetuti a intervalli regolari. In caso di reazioni localizzate, pulire e disinfettare immediatamente la ferita.