

# Produktübersicht

Wundversorgung



# Weniger Tage mit Wunden.


## Inhaltsverzeichnis

4   Das Wund-Dreieck	5   Der Coloplast Wundberg
6   Schaumverbände Die 3DFit® Technologie Biatain® Biatain® Silicone Biatain® Silicone Non-Border Biatain® Silicone Lite	16   Schaumverbände mit Silber Biatain® Ag Biatain® Silicone Ag
20   Schaumverbände mit Ibuprofen Biatain® Ibu	22   Hydrokolloide Comfeel® Plus Flexibel Comfeel® Plus Transparent
26   Superabsorber Biatain® Super	28   Faserverbände Biatain® Fiber
30   Alginate/ Alginate mit Silber Biatain® Alginate Biatain® Alginate Ag	34   Wundkontaktauflagen Biatain® Contact
36   Wundspülung/ Hautpflege/ Hautschutz Allrinse® Purilon® Atrac-Tain®	40   Hautfaltenversorgung InterDry®
42   Bestellinformationen	52   Ask Coloplast
	53   Coloplast® Professional

# Das Wund-Dreieck

Coloplast hat weltweit viele Fachkräfte danach befragt, welche Faktoren neben den ganzheitlichen Aspekten der Wundursache und den Patientenbedürfnissen bei der lokalen Wundbeurteilung am wichtigsten sind. Die Antwort war eindeutig: Wundgrund, Wundrand und Wundumgebung. Denn alle drei Punkte tragen entscheidend zur Wundheilung bei.

Das Coloplast Wund-Dreieck – ein intuitives Konzept zur einfachen Wundbeurteilung.

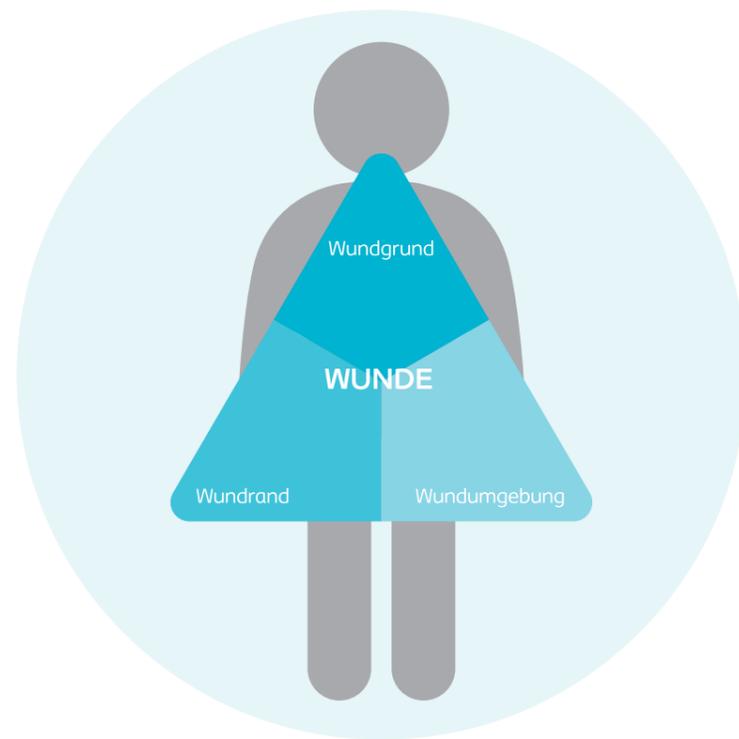

## Wundgrund

Klinisch relevantes Ziel im Wundgrund ist die Abwesenheit von Infektion, ein optimal feuchtes Wundmilieu und die Bildung von Granulationsgewebe. Der Wundberg zeigt je nach Wundstadium phasengerechte Handlungsoptionen auf.


## Wundrand

Der Wundrand sollte vor Störfaktoren, wie z. B. Mazeration und Nekrosen, geschützt werden. Biatain® Schaumverbände schützen den Wundrand durch eine exzellente Absorption und ihre Wölbung zum Wundgrund.

## Wundumgebung

Bei der wundumgebenden Haut wird eine gesunde, von Mazeration und Irritation freie Haut angestrebt. Auch trockene Haut und Hyperkeratosen sollten erfasst und behandelt werden. Ein wichtiger Faktor zum Schutz der wundumgebenden Haut ist die Auswahl eines Verbands mit geeigneter Haftung. Die Biatain® Schaumverbände bieten daher für jeden Hauttyp geeignete Haftarten.

# Der Coloplast Wundberg

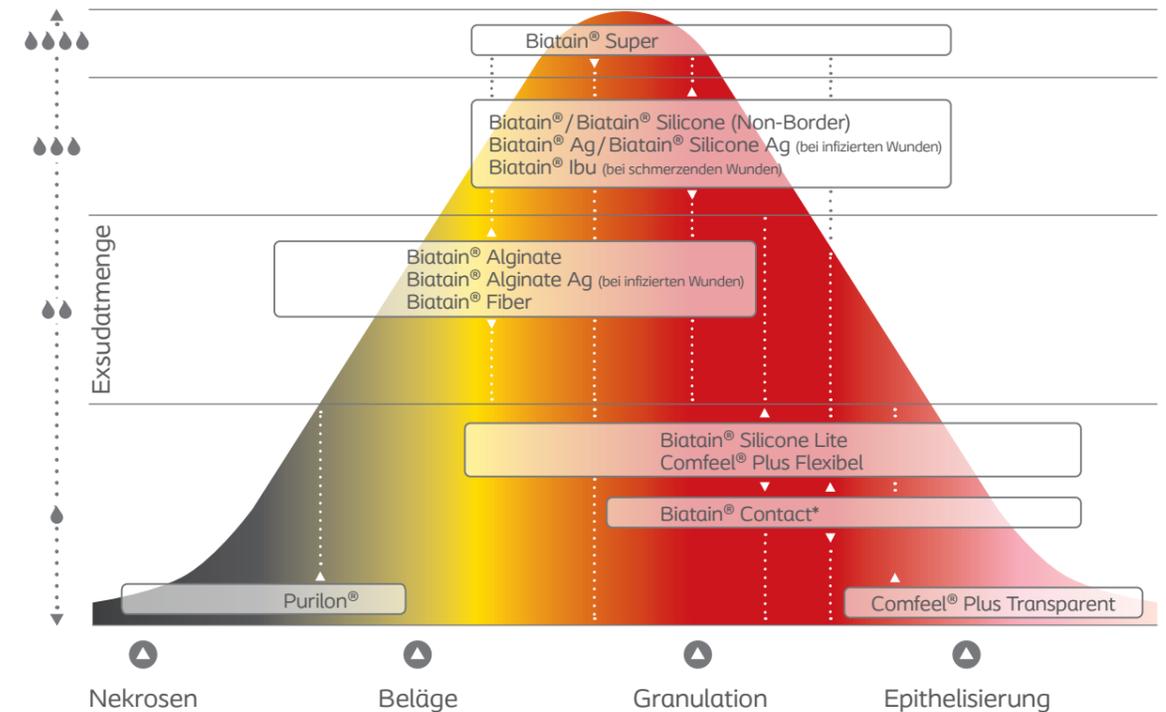

\*Exsudataufnahmekapazität ist abhängig vom Sekundärverband.

Wundheilungsphase   
Exsudatlevel  ▶

Gemäß den Eckpunkten des Wund-Dreiecks sind die Beurteilung des Wundgrundes sowie die daraus abgeleiteten Behandlungsoptionen wichtige Bestandteile des lokalen Wundmanagements. Bei der Verbandauswahl sollten sowohl die Menge des austretenden Exsudates als auch die Wundheilungsphase berücksichtigt werden. Zusätzlich sollten bei hoher bakterieller Belastung und auftretendem Wundschmerz entsprechende topische und/oder systemische Therapien eingeleitet werden. Der Coloplast Wundberg bietet eine Orientierungshilfe zu den Einsatzgebieten der einzelnen Verbände.

### EXSUDATMENGE

- leicht
- leicht – mittel
- leicht – stark
- mittel – stark
- leicht – sehr stark

### EIGENSCHAFTEN

- Antimikrobiell
- Zuschneidbar
- Wasserfest
- Fixierung nötig
- Sekundärverband nötig




## Biatain® Schaumverbände mit einzigartiger 3DFit Technologie

Passt. Einfach. Perfekt.

Durch die 3DFit Technologie wölben sich Biatain® Schaumverbände zum Wundgrund, stellen einen direkten Kontakt her, verhindern eine Exsudatansammlung und sorgen so für ein optimales Wundheilungsmilieu.

Wölbung zum Wundgrund

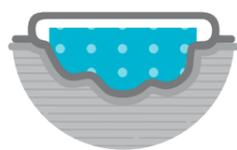

Vertikale Absorption



Hohes Rückhaltevermögen



### Biatain® Silicone Schaumverband

- › für alle Hauttypen
- › auch für brüchige Alters- und vorgeschädigte Umgebungshaut
- › sicherer Halt dank perforiertem Silikon-Distanzgitter über der gesamten Verbandfläche
- › schmerzloser Verbandwechsel



### Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband

- › auch für Wunden mit brüchiger, fragiler wundumgebender Haut
- › hautfreundlich und sanft haftend
- › wie eine 3. Hand beim Verbandwechsel

Eigenschaften gelten auch für Biatain® sanft-haftend



### Biatain® Schaumverband selbst-haftend

- › für die Behandlung von Wunden mit intakter wundumgebender Haut
- › sicheres Fixieren dank Hafttrand auf Hydrokolloidbasis
- › kein ungewolltes Abrollen
- › bakterien- und wasserabweisender Topfilm



### Biatain® Schaumverband nicht-haftend

- › für vorgeschädigte wundumgebende Haut und bei auftretenden Hautirritationen
- › abgeflachte Ränder verringern das Auftreten von Druckstellen

### Biatain® Haftarten

#### Hauttyp

	 selbst-haftend (Silikon)	 sanft-haftend (Silikon)	 selbst-haftend (Hydrokolloid)	 nicht-haftend
Normale Haut	✓	✓	✓	✓
Leicht geschädigte Haut	✓	✓	✓	✓
Stark geschädigte Haut	✓	✓		✓
Fragile Haut	✓	✓		✓



# Biatain®

## Exzellente Absorption für optimale Wundheilung

### Indikation


Biatain® Schaumverband ist für mittel bis stark exsudierende chronische und akute Wunden indiziert, wie beispielsweise:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades

*Biatain® sanft-haftend und nicht-haftend sind für alle Hauttypen geeignet. Biatain® selbst-haftend eignet sich besonders für intakte Umgebungshaut.*

### Vorteile

- › Direkter Kontakt zum Wundgrund durch die 3DFit Technologie
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen
- › Sicher auch unter Kompression

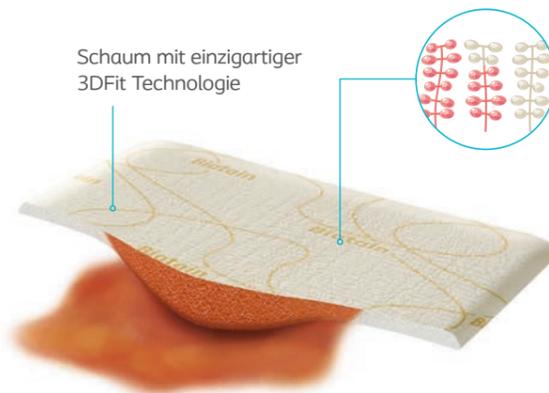

### Kurzbeschreibung

Der Biatain® Schaumverband wölbt sich aufgrund der einzigartigen 3DFit Technologie zum Wundgrund und stellt einen direkten Kontakt her. Durch die exzellente Absorption wird verhindert, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt.

Die Kombination aus Wölbung zum Wundgrund, vertikaler Absorption und sehr gutem Rückhaltevermögen schützt vor Mazeration und Leckagen, auch unter Kompression. Auf der Außenseite des Verbands schützt eine semipermeable Polyurethanfolie vor Keimen und Feuchtigkeit.

#### EIGENSCHAFTEN      EXSUDATMENGE



\*Nur bei Biatain® selbst-haftend und Biatain® Sakrum/Ferse  
\*\*Nur bei Biatain® nicht-haftend und Biatain® sanft-haftend



Ulcus am Unterschenkel nach dem ersten Verbandwechsel. Exsudat wurde vom Verband vertikal aufgenommen.



Applikation Biatain® nicht-haftend 10 x 10 cm.



Nach einigen Tagen der Behandlung mit Biatain® ist eine Verkleinerung der Wunde und granulierendes Gewebe zu erkennen.

### Produktnutzen

- › Biatain® wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird der Wundrand geschützt und verhindert, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Biatain® Schäume absorbieren vertikal, dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Biatain® Schäume sind besonders weich und flexibel für einen optimalen Tragekomfort
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen
- › Einfache, wirtschaftliche Versorgung (Mögliche Ersparnis zusätzlicher Wundfüller)



### Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Schaumverband kombiniert die bewährte 3DFit Technologie des Biatain® Schaums mit einem zusätzlichen Superabsorber-Depot und einer sanften Silikonhaftung.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht eine hohe Absorption.

Der semipermeable, wasser- und bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE



Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt und bietet einen hohen Tragekomfort.



Biatain® Silicone wölbt sich dank der 3DFit Technologie zum Wundgrund und passt sich optimal den Konturen der Wunde an.



Biatain® Silicone hält 99,98% der Keime im Schaumverband zurück (in vitro getestet)\*.

### Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Exsudat und Bakterien werden aufgenommen und 99,98% der Keime im Schaumverband gebunden – auch unter Druck\*
- › Es wird ein optimales Wundheilungsmilieu gefördert und das Infektionsrisiko reduziert
- › Der optimale Kontakt zum Wundgrund minimiert das Risiko, dass sich Exsudat in der Wunde sammelt
- › Absorbiert Wundexsudat vertikal und hält es sicher zurück. Risiko von Mazeration und Leckagen wird minimiert
- › Direkter Kontakt zum Wundbett stimuliert die Granulation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen und wirtschaftliche Versorgung durch möglichen Verzicht von zusätzlichen Wundfüllern

\*In vitro-Untersuchung (Report ID: PB072-015-V2), eine Übertragbarkeit der in der Untersuchung gefundenen In vitro-Ergebnisse auf die klinische Praxis bedarf weiterer Untersuchungen. Posterpräsentation: bei Wounds UK annual conference November 2019, Harrogate

## Biatain® Silicone

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

### Indikation


Biatain® Silicone ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain® Silicone ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.

### Vorteile

- › Wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und reduziert die Exsudatansammlung
- › Absorbiert Wundexsudat sowie Keime
- › Hält 99,98% der Keime im Schaumverband zurück (in vitro getestet)\*
- › Reduziert das Infektionsrisiko

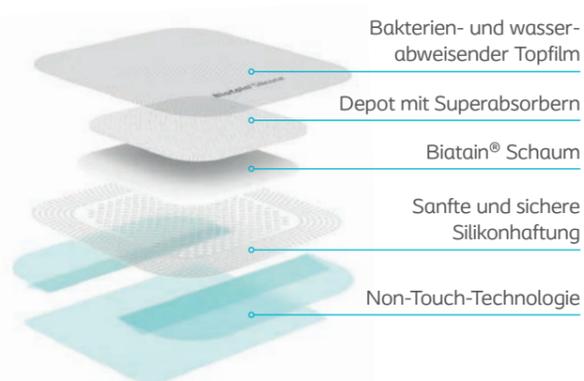



**Kurzbeschreibung**

Biatain® Silicone Non-Border Schaumverband kombiniert die bewährte 3DFit Technologie des Biatain® Schaums mit einer vollflächigen Silikonhaftung ohne Haftrand.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben. Die Perforation ermöglicht außerdem eine exzellente Absorption. Der semipermeable, bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.

EIGENSCHAFTEN



EXSUDATMENGE



3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.



Biatain® Silicone Non-Border ist zuschneidbar, daher ideal geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.).



Exsudat wird auch unter Kompression absorbiert und im Schaumverband zurückgehalten.

# Biatain® Silicone Non-Border

Für sanfte Haftung bei exsudierenden Wunden

**Indikation**

Biatain® Silicone Non-Border ist eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an wenig bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Traumatische Wunden

*Biatain® Silicone Non-Border ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.*

**Vorteile**

- › Wölbt sich zum Wundgrund, stellt einen direkten Kontakt her und reduziert Exsudatansammlungen
- › Unter Kompression einsetzbar
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (bspw. Finger, Zehen, usw.)
- › »Dritte« Hand beim Verbandwechsel



**Produktnutzen**

- › Wölbt sich zum Wundgrund und stellt einen direkten Kontakt her, um Exsudatansammlungen zu reduzieren
- › Mit Kompressionstherapie kombinierbar, Exsudat wird vertikal absorbiert und sicher zurückgehalten
- › Wundrand wird geschützt und Mazerationen und Leckagen minimiert
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Zuschneidbar, daher geeignet für schwer zu versorgende Körperregionen (z. B. Finger, Zehen, usw.)
- › Weich und anschmiegsam und daher geeignet für das Anbringen in Hautfalten
- › Sanfte, vollflächige Silikonhaftung dient als »dritte« Hand beim Verbandwechsel und erleichtert so die Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen und wirtschaftliche Versorgung durch möglichen Verzicht von zusätzlichen Wundfüllern



# Biatain® Silicone Lite

Für sanfte Haftung bei schwach exsudierenden Wunden

## Indikation


Biatain® Silicone Lite ist ein dünner und sehr flexibler Schaumverband für schwach bis mittelstark exsudierende chronische und akute Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

*Biatain® Silicone Lite ist für alle Hauttypen geeignet, auch für brüchige und fragile Altershaut.*

## Vorteile

- › Vertikale Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden
- › Sehr dünn und besonders flexibel
- › Kann helfen postoperative Blasenbildung zu verhindern

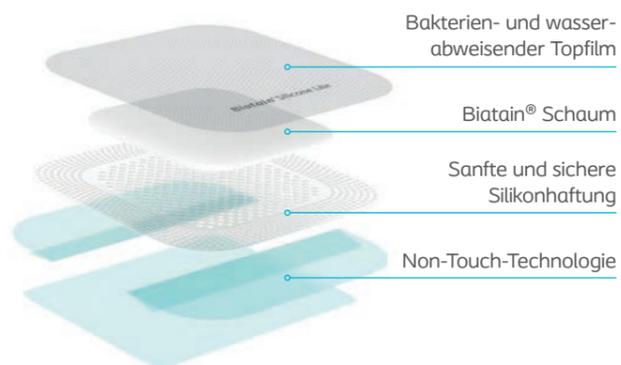

## Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Lite ist ein besonders dünner, sehr flexibler und anpassungsfähiger Schaumverband mit 3DFit Technologie.

Die sanfte, perforierte Silikonhaftung befindet sich auf der gesamten Fläche des Verbands und bietet dadurch einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben.

Der Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest. Der Verband besitzt eine 3-teilige Applikationsfolie für eine einfache und aseptische Applikation.

Durch seine besondere Flexibilität eignet sich Biatain® Silicone Lite für eine Vielzahl an akuten und chronischen Wunden.

## Produktnutzen

- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und passt sich den Konturen der Wunde an. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Die sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt ohne mit der Wunde zu verkleben. Dies ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Aufgrund des semipermeablen, wasser- sowie bakterienabweisenden Topfilms wird dem Patienten das Duschen ermöglicht
- › Die 3-teilige Non-Touch-Technologie erleichtert eine einfache und aseptische Applikation
- › Lange Tragedauer von bis zu 7 Tagen

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



Der Verband ermöglicht durch seine besondere Flexibilität eine sichere Versorgung an schwer zu versorgenden Körperstellen.



Biatain® Silicone Lite eignet sich auch für Akutwunden.



Vertikale Absorption für schwach bis mittelstark exsudierende Wunden.



### Kurzbeschreibung

Biatain® Ag ist ein antimikrobieller Schaumverband mit 1,0 mg/cm<sup>2</sup> ionischem Silber, der ein optimales Wundheilungsmilieu schafft und erhält.

Biatain® Ag basiert auf dem bewährten Biatain® Schaum mit 3DFit Technologie. Er enthält zusätzlich homogen verteilte, antimikrobiell wirksame Silberkomplexe. Durch den Kontakt zum Wundbett werden die Silberionen, in Abhängigkeit vom aufgenommenen Exsudat, lokal am Wundgrund freigesetzt. So kann die Keimbelastung und die lokale Infektion dort behandelt werden, wo sie auftritt.

EIGENSCHAFTEN      EXSUDATMENGE



\*Nur bei Biatain® Ag selbst-haftend  
\*\*Nur bei Biatain® Ag nicht-haftend



Dekubitus mit Wundheilungsstörung aufgrund bakterieller Belastung.



Keimreduzierung durch exzellentes Exsudatmanagement und effektive Silberwirkung.



Wundversorgung mit Biatain® Ag.

# Biatain® Ag

Für lokal infizierte Wunden

### Indikation


Biatain® Ag ist für mittel bis stark exsudierende, bakteriell belastete chronische und akute Wunden indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

Biatain® Ag nicht-haftend ist für alle Hauttypen geeignet. Biatain® Ag selbst-haftend eignet sich besonders bei intakter Umgebungshaut.

### Vorteile


- › Wölbt sich zum Wundgrund
- › Wirkt lokal am Wundgrund
- › Antimikrobielle Wirksamkeit auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas

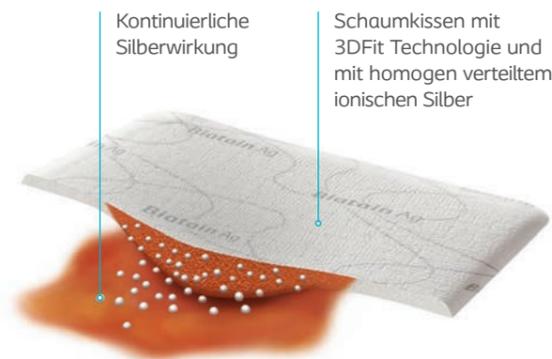

### Produktnutzen

- › Wölbt sich zum Wundgrund und minimiert so das Risiko von Mazeration und Leckagen
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schnellere Wundheilung durch antimikrobielle Wirksamkeit von bis zu 7 Tagen
- › Kosten- und Zeitersparnis durch verlängerte Verbandwechselintervalle
- › Wirkt auch gegen antibiotikaresistente Keime wie MRSA, VRE und ESBL
- › Tötet 99,99% der reifen Biofilme\* (P. aeruginosa) und verhindert die Biofilmneubildung (in vitro getestet)

\*Reife Biofilme sind als mindestens 24h alt definiert.

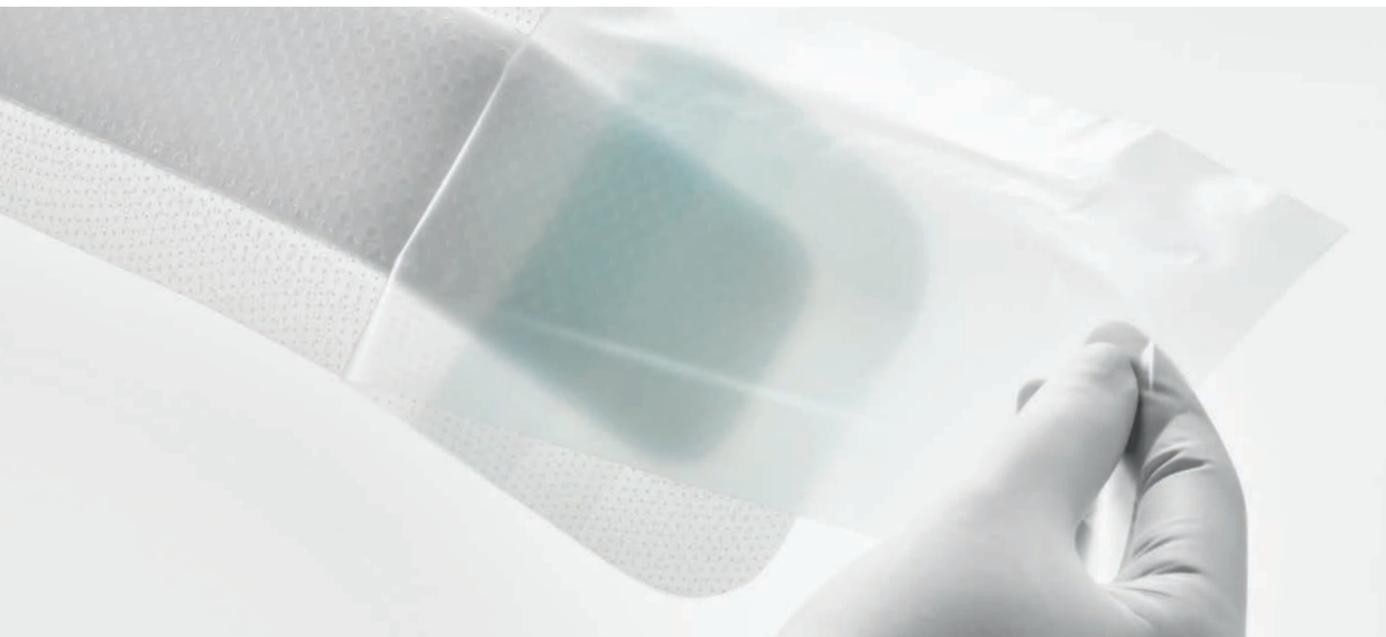

## Biatain® Silicone Ag

Für sanfte Haftung bei lokal infizierten Wunden

### Indikation

Biatain® Silicone Ag ist für ein breites Spektrum an mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden mit verzögerter Heilung aufgrund von Bakterien oder für Wunden mit Infektionsrisiko indiziert, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetische Fußulcera
- › Verbrennungen 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

**Biatain® Silicone Ag ist für alle Hauttypen geeignet. Auch für brüchige und fragile Altershaut.**

### Vorteile

- › Wirkt lokal am Wundgrund
- › Wirkt auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas
- › Sichere und sanfte Haftung



### Kurzbeschreibung

Biatain® Silicone Ag Schaumverband bietet dank der 3DFit Technologie eine hohe Absorption und Retention und stellt einen direkten Kontakt zum Wundgrund her, was eine lokale Silberwirkung ermöglicht.

Der Verband aktiviert bis zu 7 Tage kontinuierlich und kontrolliert ionisches Silber und wirkt so über die gesamte Tragezeit gegen die üblicherweise in infizierten, nicht heilenden Wunden vorkommenden Bakterien, auch gegen MRSA, VRE, ESBL und Pseudomonas.

Die perforierte, vollflächige Silikonhaftung bietet einen sicheren Halt, ohne mit der Wunde zu verkleben und ermöglicht eine hohe Absorption. Der semipermeable, wasser- sowie bakterienabweisende Topfilm schützt die Wunde von außen und ist duschfest.

### Produktnutzen

- › Wölbt sich und ermöglicht so einen optimalen Kontakt zum Wundgrund. Dies minimiert das Risiko von Mazeration und Leckagen und schützt den Wundrand
- › Hohes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Kann durch die 3DFit Technologie Kosten für einen Wundfüller sparen
- › Sehr gute Passform und ein optimales Tragegefühl, auch an schwer zu versorgenden Körperstellen
- › Sanfte Silikonhaftung sorgt für einen sicheren Halt und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel
- › Silberaktivierung zur schnellen Abtötung von Bakterien
- › Tötet 99,99% der reifen Biofilme\* (P. aeruginosa) und verhindert die Biofilmneubildung (in vitro getestet)

\* Reife Biofilme sind als mindestens 24h alt definiert.

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE



3-teilige Non-Touch-Technologie zur einfachen und aseptischen Applikation.



Silberaktivierung über die gesamte Tragedauer von bis zu 7 Tagen.



Hohe Absorption und antimikrobielle Wirkung für bakteriell belastete/lokal infizierte Wunden.



### Kurzbeschreibung

Biatain® Ibu kombiniert den bewährten Biatain® Schaum mit einer lokalen und kontinuierlichen Freisetzung von Ibuprofen.

Durch die 3DFit Technologie wölbt sich der Schaum zum Wundgrund, absorbiert schnell Exsudat und speichert dieses sicher.

Pro cm<sup>2</sup> sind 0,5 mg Ibuprofen homogen im Schaum verteilt. In Abhängigkeit der Exsudatmenge wird das Ibuprofen lokal direkt am Wundgrund abgegeben und kann so durch Gewebeschädigungen bedingten Wundschmerz reduzieren.

EIGENSCHAFTEN



EXSUDATMENGE



Schmerzhafte Wunde im Bereich der Ferse.



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration.



Biatain® Ibu lässt sich auch an schwer zu versorgenden Körperstellen optimal anmodellieren.

# Biatain® Ibu

## Exzellente Absorption für schmerzhafte Wunden

### Indikation

Biatain® Ibu Schaumverband für mittel bis stark exsudierende und durch Gewebeschädigung schmerzende Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Nicht infiziertes diabetisches Fußsyndrom
- › Spalthautentnahmestellen (nur nicht-haftend)
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen
- › Brandwunden 2. Grades
- › Für Wunden, die keine tieferen Schichten als die Haut betreffen.

**Biatain® Ibu sanft-haftend und nicht-haftend sind für alle Hauttypen geeignet.**


### Vorteile

- › Exzellente Absorption auch unter Druck
- › Effektive lokale Wirkung
- › Schnelle Schmerzlinderung



### Produktnutzen

- › Der Verband wölbt sich zum Wundgrund und absorbiert vertikal. So wird das Risiko von Mazeration und Leckagen minimiert
- › Exzellentes Absorptions- und Rückhaltevermögen auch unter Kompression
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu
- › Lokale Freisetzung und Wirkung von Ibuprofen ohne systemische Belastung
- › Kann durch Gewebeschädigungen bedingte Wundschmerzen reduzieren
- › Schnelle und langanhaltende Wirkung auch während des Verbandwechsels (bis zu 7 Tage)
- › Erhöht die Lebensqualität des Patienten

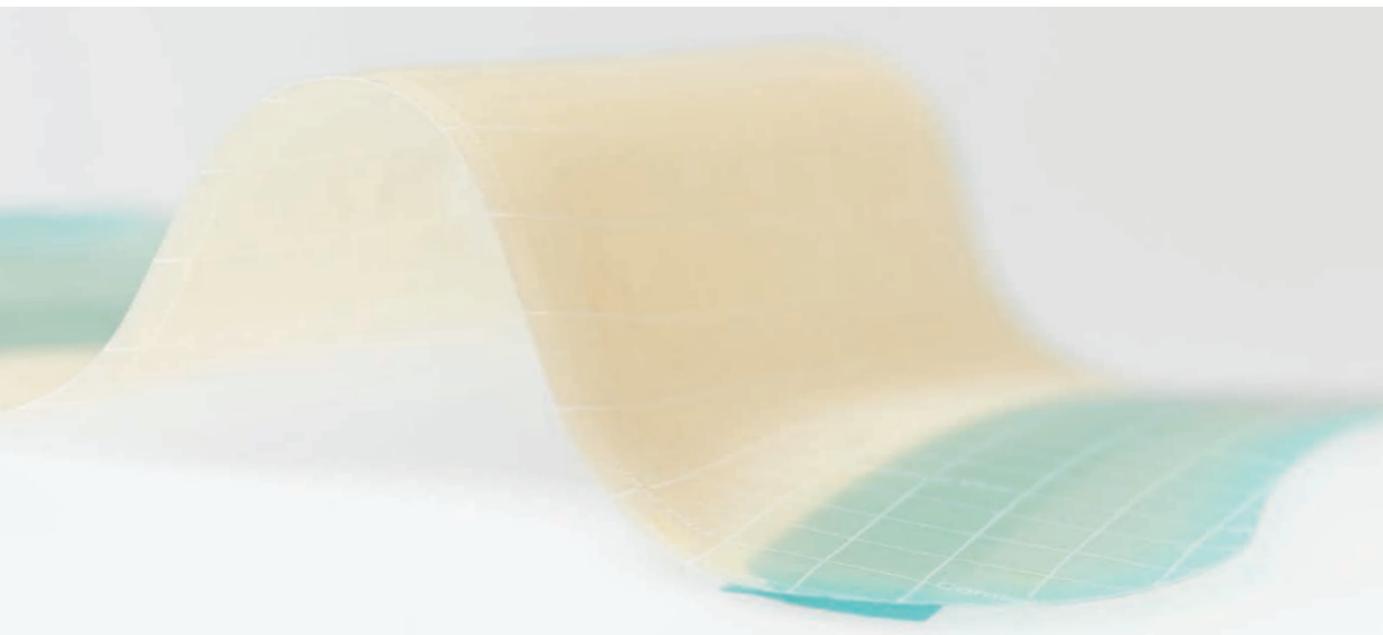

## Comfeel® Plus Flexibel

Sicherer Schutz und optimale Wundheilung


### Indikation

Comfeel® Plus Flexibel ist für die Behandlung von schwach bis mittelstark exsudierenden chronischen und akuten Wunden indiziert, insbesondere für:

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden
- › Hautabschürfungen

### Vorteile

- › Besonders flexibel
- › Hautfreundlich
- › Enthält CMC und Alginat

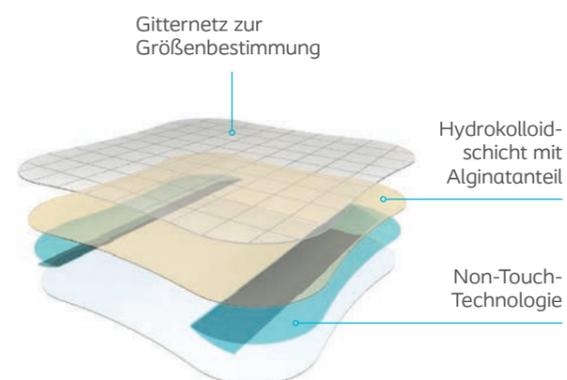

### Kurzbeschreibung

Comfeel® Plus Flexibel ist ein besonders anpassungsfähiger und hautfreundlicher Hydrokolloidverband.

In der selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind stark quellfähige Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel und Calciumalginat eingebettet, die für eine höhere Absorptionsfähigkeit sorgen.

Durch die semipermeable Polyurethanfolie passt sich die Verdunstungsrate der Menge des Exsudates an, wodurch unter dem Verband stets ein optimal feuchtes Wundmilieu besteht. Zusätzlich schützt die semipermeable Folie die Wunde vor Bakterien und Infektionen.

EIGENSCHAFTEN



EXSUDATMENGE



Sterile Applikation von Comfeel® Plus Flexibel.



Sobald sich die gebildete Gelblase dem Verbandrand nähert, sollte der Verband gewechselt werden.




Ablösen des gelierten Verbands.

### Produktnutzen

- › Die Oberfläche ermöglicht eine problemlose Grundpflege. Mobile Patienten können mit dem Verband duschen und baden
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Abgeflachte Kanten wirken einem Aufrollen des Verbands entgegen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › Sehr flexibel für eine einfache Anwendung und mehr Patientenkomfort
- › Erhöhte Exsudatmanagement-Eigenschaften schaffen ein optimal feuchtes Wundmilieu und erhöhen die Tragedauer

# Comfeel® Plus Transparent

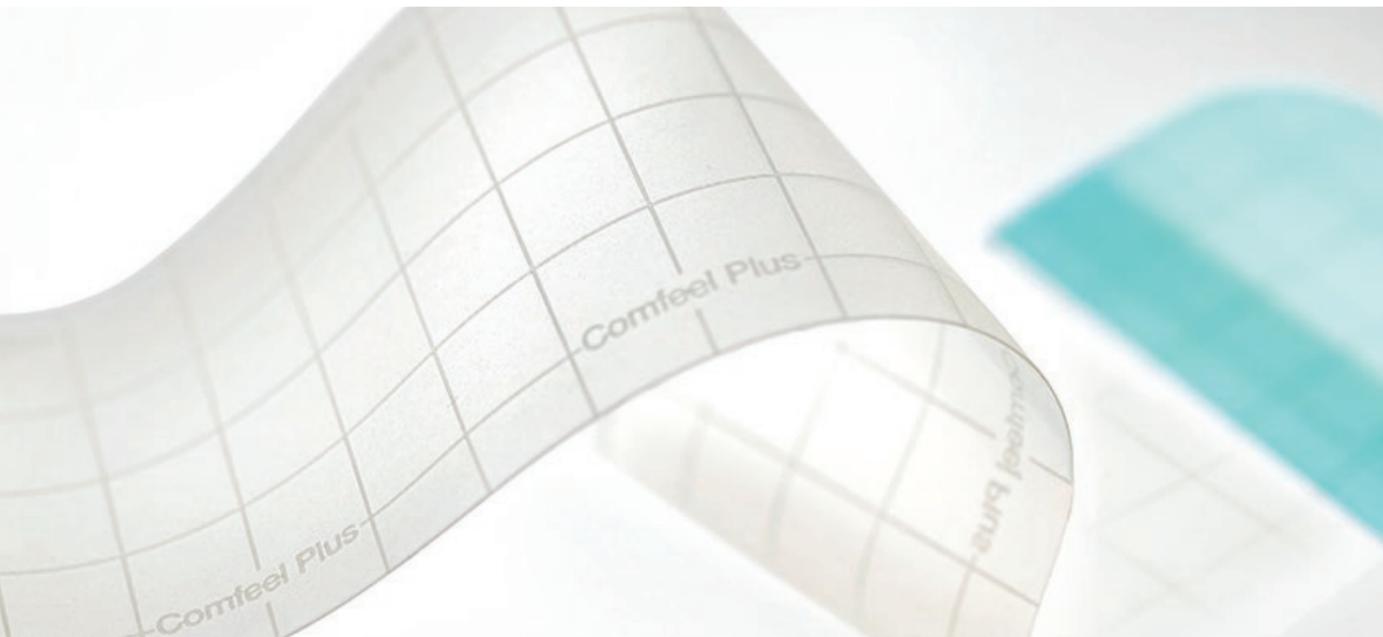

## Comfeel® Plus Transparent

### Für Schutz und Kontrolle


#### Indikation

Comfeel® Plus Transparent ist angezeigt bei akuten Wunden oder bei bereits epithelisierenden Wunden, wie z. B.

- › Postoperative Wunden
- › Spalthautentnahmestellen
- › Abschürfungen
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades
- › Oberflächliche, chronische Wunden in der Epithelisierungsphase

#### Vorteile

- › Transparent
- › Hautfreundlich
- › Hoher Tragekomfort

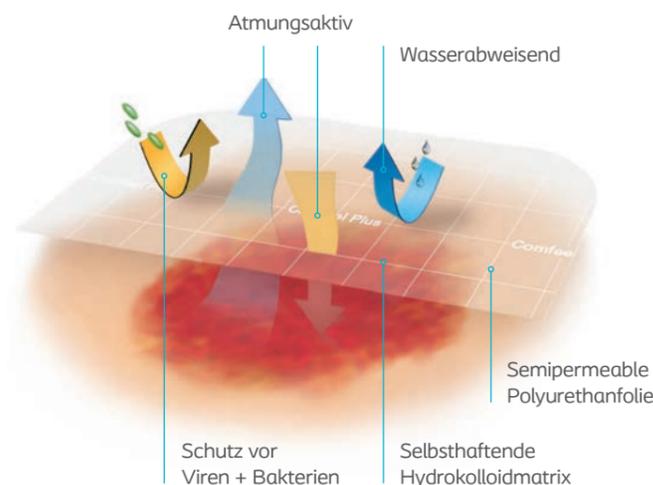

#### Kurzbeschreibung

Comfeel® Plus Transparent ist ein besonders dünner, durchsichtiger Hydrokolloidverband.

In der stabilen, selbsthaftenden Hydrokolloidmatrix sind Carboxymethylcellulose (CMC)-Partikel eingebettet, die mit dem Wundexsudat ein kohäsives Gel bilden, welches die Wunde schützt und ein Verkleben mit dem neu gebildeten Epithel verhindert.

Die semipermeable Polyurethanfolie sorgt für ein stets optimal feuchtes Wundmilieu und schützt die Wunde vor Bakterien und Feuchtigkeit.

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE



Flexibel und dünn zum Versorgen an schwierigen Körperstellen.

#### Produktnutzen

- › Die hohe Transparenz ermöglicht eine Wundinspektion ohne Verbandwechsel
- › Flexibel und dünn für hohen Tragekomfort und eine einfache Anwendung; auch an schwer zu versorgenden Körperregionen
- › Einfache Wundgrößenbestimmung durch Gitternetz
- › 3-teilige Non-Touch-Technologie für eine aseptische und einfache Applikation
- › Glatte Oberfläche sorgt für weniger Reibungs- und Scherkräfte
- › Passt sich wie eine zweite Haut an und reduziert so das Risiko von Spannungsblasen
- › Wasserabweisende Oberfläche ermöglicht problemlos die Grundpflege und ist duschfest



Einfaches und schnelles Bestimmen der Wundgröße dank Transparenz und Gitternetz.



Comfeel® Plus Transparent verklebt nicht mit dem Nahtmaterial.



## Biatain® Super

Mehr als nur Absorption

### Indikation

Biatain® Super Hydrokapillarverband für leicht bis sehr stark exsudierende Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera


Verbände können während des gesamten Heilungsverlaufs eingesetzt werden. Zum Schutz von:

- › Brandwunden 2. Grades
- › Chirurgischen Wunden
- › Hautabschürfungen

*Biatain® Super nicht-haftend eignet sich für alle Hauttypen, Biatain® Super selbst-haftend insbesondere für intakte Umgebungshaut.*

### Vorteile

- › Sehr saugstark mit Superabsorbent
- › Sehr gutes Rückhaltevermögen
- › Einfache Handhabung

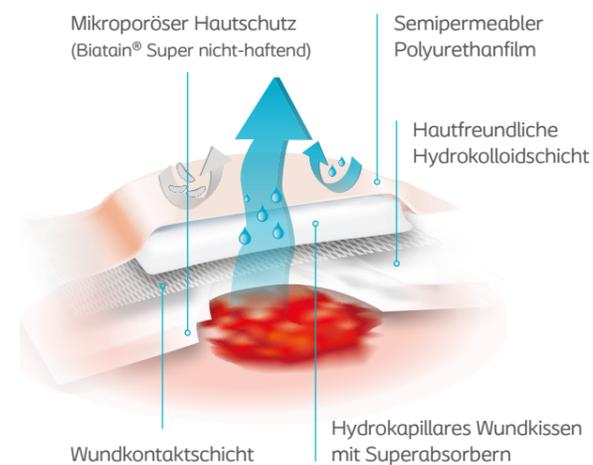

### Kurzbeschreibung

Biatain® Super ist ein anschmiegsamer und flexibler Kompletverband, der dank des integrierten Distanzgitters nicht mit dem Wundgrund verklebt. Schnelle Absorption sowie die Verteilung und Speicherung von Wundexsudat ermöglichen die volle Nutzung der Absorptionskapazität bei minimalem Risiko von Mazeration und Leckagen, selbst bei stark exsudierenden Wunden.

Biatain® Super selbst-haftend verfügt über einen hautfreundlichen Hydrokolloidhafrand, die nicht-haftende Variante über einen mikroporösen Hautschutz.

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE



\* Nur bei Biatain® Super selbst-haftend  
\*\* Nur bei Biatain® Super nicht-haftend



Ausgangssituation: Dekubitus 2. Grades, Größe ca. 2 x 1 cm, Wundumgebung mazeriert



Nach 2 Wochen: Wundgröße verringert, gesundes Granulationsgewebe, keine Mazeration



Nach 4 Wochen: Dekubitus fast abgeheilt, Umgebungshaut gesund

### Produktnutzen

- › Gute Absorptionseigenschaften und gutes Rückhaltevermögen
- › Hohe Aufnahmekapazität
- › Schafft ein optimal feuchtes Wundmilieu
- › Das integrierte Distanzgitter schützt neu gebildetes Gewebe ohne mit der Wunde zu verkleben
- › Wirtschaftlicher Einsatz durch lange Tragedauer
- › Ermöglicht dem Patienten das Duschen



## Kurzbeschreibung

Biatain® Fiber ist ein gelbildender Faserverband, der aus Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) und Bikomponentenfaser besteht. Durch ein thermofixiertes Netz in stabiler Hexagon-Form wird der Verband zusätzlich verstärkt. Dies nennt sich HexaLock Technologie®.

Bei Kontakt mit Wundexsudat absorbieren die CMC-Fasern im Verband das Exsudat und bilden ein formstabiles Gel. Der gelierte Verband hält das Exsudat zurück und passt sich dem Wundbett an, wodurch ein feuchtes Wundheilungsmilieu entsteht. Diese Umgebung unterstützt den Heilungsprozess der Wunde und erleichtert die Entfernung von avitalem Gewebe (autolytisches Debridement).

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



Biatain® Fiber schützt den Wundrand durch eine vertikale Absorption.



Lässt sich einfach in einem Stück entfernen.



Versorgung mit Biatain® Fiber bei einer tiefen und unterminierten Wunde.

# Biatain® Fiber

## Mehr als nur ein Faserverband


### Indikation

Biatain® Fiber ist ein gelbildender Faserverband für die Versorgung von mittel bis stark exsudierenden chronischen und akuten Wunden, einschließlich Wundhöhlen, wie z. B.

- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Ulcus cruris (arteriell, venös und gemischte Ätiologie)
- › Dekubitus (Grad II bis IV)
- › Exsudatabsorption bei onkologischen Wunden
- › Traumatische Wunden
- › Verbrennungen 2. Grades
- › Spalthautentnahmestellen
- › Postoperative Wunden

### Vorteile

- › Schließt Exsudat und Bakterien ein
- › Minimales Schrumpfen
- › Formstabiles Gel

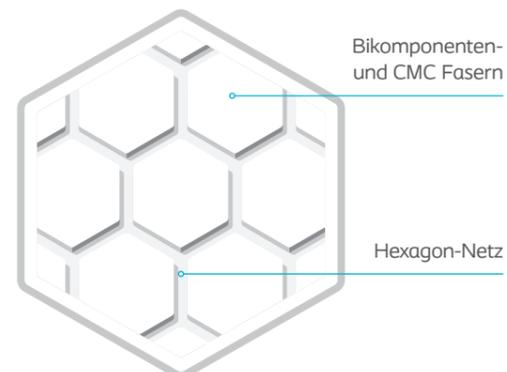

### Produktnutzen

- › Hohe Absorptionsfähigkeit
- › Schließt Wundexsudat und Bakterien sicher ein
- › Schrumpft minimal und minimiert so das Risiko, dass sich Hohlräume und Exsudatansammlungen bilden
- › Einfache Entfernung in einem Stück durch formstabiles Gel
- › Minimales Risiko, Gel-Rückstände in der Wunde zu hinterlassen.
- › Absorbiert vertikal und schützt so den Wundrand vor Feuchtigkeitsschäden
- › Entfernt Beläge und unterstützt ein autolytisches Debridement



## Biatain® Alginate

Für belegte Wunden und Wundhöhlen


### Indikation

Biatain® Alginate ist vorwiegend anzuwenden zur Wundreinigung oder als Wundfüller bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades

### Vorteile

- › Reinigende Wirkung
- › In einem Stück entfernbar
- › Lokale Absorption

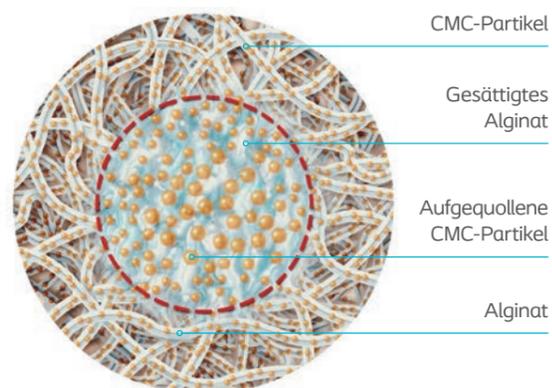

### EIGENSCHAFTEN



### EXSUDATMENGE



### Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate besteht zu 85 % aus Calciumalginat und zu 15 % aus hydrokolloiden Carboxymethylcellulose-Partikeln (CMC).

Die verwebte Materialstruktur bildet durch Ionenaustausch in Verbindung mit dem absorbierten Exsudat ein kohäsives Gel, das die Wunde feucht hält und Wundsekret sowie Gewebetrümmer aufnimmt und sicher einschließt.



Postoperative, sekundär heilende Wunde.



Applikation von Biatain® Alginate in die Wunde.



Biatain® Alginate benötigt immer einen geeigneten Sekundärverband (z. B. Comfeel® Plus oder Biatain® Silicone).

### Produktnutzen

- › Natürliche Reinigungsfunktion
- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Erhöhte Absorptionskapazität durch Materialkombination aus Calciumalginat und CMC-Partikeln sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ein ideal feuchtes Wundmilieu
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Einfach und atraumatisch in einem Stück entfernbar, ohne Rückstände in der Wunde
- › Blutstillender Effekt durch Calcium-Ionen



## Biatain® Alginate Ag

Für belegte, lokal infizierte Wunden und Wundhöhlen

### Indikation


Der Biatain® Alginate Ag ist angezeigt bei mittelstark bis stark exsudierenden Wunden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitus
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Postoperative Wunden
- › Traumatische Wunden
- › Hautentnahmestellen
- › Wundhöhlen
- › Oberflächliche und mitteltiefe Verbrennungen

Biatain® Alginate Ag kann bei der Behandlung lokal infizierter Wunden oder Wunden, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden.

### Vorteile

- › Natürliche Reinigung
- › In einem Stück entfernbar
- › Antimikrobielle Wirksamkeit

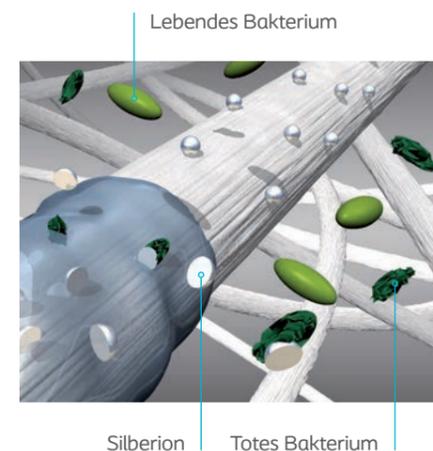

### Kurzbeschreibung

Biatain® Alginate Ag ist eine hochsaugfähige, antimikrobielle Wundauflage aus Calciumalginat und Carboxymethylcellulose (CMC) und 0,5% ionischem Silber.


Bei Exsudataufnahme bildet sich ein kohäsives, strukturbeständiges Gel, das die Wunde feucht hält sowie Wundsekrete, abgetötete Bakterien und Gewebetrümmer sicher einschließt.

Zusätzlich werden in Abhängigkeit von der aufgenommenen Exsudatmenge Silberionen freigesetzt (Hydroaktivierung). Eine antimikrobielle Wirkung tritt im sich formenden Gel und am Wundgrund ein.

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE

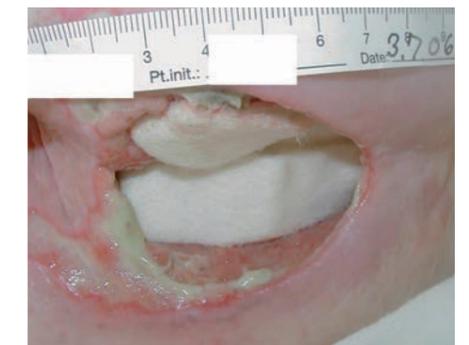

Applikation von Biatain® Alginate Ag zu Behandlungsbeginn.



Beim nächsten Verbandwechsel ist Biatain® Alginate Ag komplett gelöst.



Wunde nach Wundspülung am 18. Behandlungstag.

### Produktnutzen

- › Schnelle, lokale Absorptionsfähigkeit und gutes Rückhaltevermögen für reduziertes Mazerationsrisiko
- › Materialkombination erhöht die Aufnahmekapazität und sorgt für längere Tragezeit und weniger Verbandwechsel
- › Fördert die Wundheilung durch ideal feuchtes Wundmilieu, natürliche Reinigungsfunktion und Reduktion der Keimbelastung
- › Weiche und gut applizierbare Materialkombination passt sich den Konturen der Wunde an
- › Breite antimikrobielle Wirksamkeit gegen die häufigsten Oberflächen- und Gewebepathogene in chronischen Wunden. Wirkt auch gegen Candida albicans, MRSA und VRE
- › Kohäsives, strukturbeständiges Gel ermöglicht einfaches und atraumatisches Entfernen in einem Stück



## Biatain® Contact

### Verbesserter Kontakt für eine ungestörte Wundheilung

#### Indikation

Biatain® Contact ist eine silikonbeschichtete Wundkontaktauflage, geeignet für die Behandlung chronischer und akuter Wunden, wie z. B.


- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußsyndrom
- › Hautabschürfungen
- › Postoperative Wunden
- › Verbrennungen 1. und 2. Grades

in Kombination mit einem Sekundärverband.

Ebenfalls kann es als Schutzschicht auf nicht exsudierenden Wunden und bei Unterdruck-Wundtherapie (NPWT) eingesetzt werden.

#### Vorteile

- › Optimaler Exsudattransfer
- › Erleichterte Wundbeurteilung durch hohe Transparenz
- › Einfache Handhabung

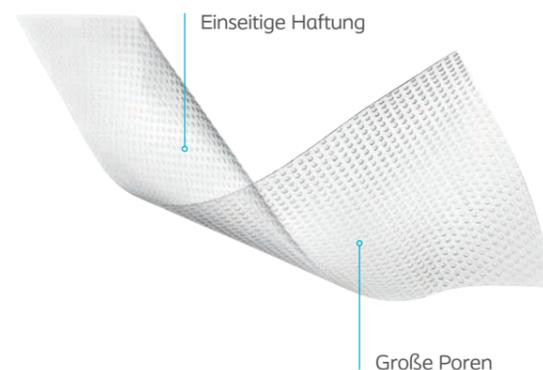

#### Kurzbeschreibung

Biatain® Contact ist eine Silikon-Wundkontaktauflage, die den Wundgrund und die Wundumgebung schützt und eine ungestörte Wundheilung fördert.

Sie besteht aus einem dünnen, flexiblen Polyurethanfilm, der einseitig mit Silikon beschichtet ist. Durch die einseitige Haftung wird die Handhabung, d. h. die Applikation und der Wechsel des Sekundärverbands erleichtert. Das Silikon wirkt einem Verkleben entgegen und sorgt für weniger Schmerzen beim Verbandwechsel.

Große Poren in dem Distanzgitter erlauben einen ungehinderten Abfluss von Exsudat in den Sekundärverband. Durch das transparente Material kann die Wunde ohne einen Verbandwechsel begutachtet werden.

#### Produktnutzen

- › Große Poren ermöglichen einen schnellen, optimalen Exsudattransfer in die Sekundärauflage
- › Kein seitliches Ausbreiten von Exsudat unter Biatain® Contact, was das Risiko von Mazerationen und Leckagen reduziert
- › Transparent für eine einfache Wundinspektion ohne Verbandwechsel
- › Einseitige Haftung für einfache Applikation und einfachen Wechsel des Sekundärverbands
- › Weniger Schmerzen und keine Schädigungen des Granulationsgewebes beim Verbandwechsel durch sanfte Silikonhaftung
- › Schützt den Wundgrund und die wundumgebende Haut und sorgt für eine ungestörte Wundheilung
- › Kein Einwachsen des Gewebes
- › Lange Tragedauer von bis zu 14 Tagen

#### EIGENSCHAFTEN



#### EXSUDATMENGE



\* je nach Sekundärverband



Transparent für die Wundinspektion, ohne dass ein Verbandwechsel nötig ist.



Biatain® Contact schützt fragiles Granulationsgewebe.



Auch bei schmerzhaften, oberflächlichen Abschürfungen oder Läsionen kann Biatain® Contact zum Einsatz kommen.



# Allrinse®

## Mehr als die Lösung zur effektiven Wundreinigung

### Indikation

Die Allrinse® Wundspüllösung reinigt und befeuchtet akute und chronische Wunden, wie z. B.

- › Schürf-, Riss- und Schnittwunden
- › Verbrennung 1 und 2. Grades
- › Ulcus cruris
- › Diabetisches Fußsulkus
- › Dekubitus

Zum Lösen anhaftender Verbandstoffe oder Verkrustungen beim Verbandwechsel.

Allrinse® ist auch zur Anwendung im Bereich des Mundes und der Schleimhäute geeignet.

\* ab Mai 2024

### Vorteile

- › Effektive Wundreinigung
- › Fördert die Wundheilung
- › Reduziert das Infektionsrisiko



### Kurzbeschreibung

Allrinse® ist eine alkoholfreie Lösung zur effektiven Reinigung, Dekontamination und Befeuchtung von chronischen und akuten Wunden.

Eine Kombination verschiedener Oberflächen-aktiver Substanzen (Tenside) in effektiver Konzentration führt zu einer besonders effektiven Reinigungswirkung. PHMB im sauren Lösungsmilieu reduziert die Keimbelastung (z. B. MRSA). Der saure pH-Wert der Lösung stabilisiert mit einem Zink-Eisen-Komplex führt zur Überwindung der chronisch-stagnativen Heilungsphase und fördert die Heilung.

### Produktnutzen

- › Schmerzfreie physikalische Wundreinigung von akuten und chronischen Wunden
- › Überwindung der stagnativen Heilungsphase durch die Optimierung des Wundmilieus
- › Effektive Dekontamination von belegten und kontaminierten Wunden (z. B. MRSA) sowie Vorbeugung von Infektionen
- › Zerstört Biofilm
- › Löst Verkrustungen und anhaftende Verbände
- › Lange nach Anbruch haltbar (3 Monate)
- › Einfach in der Anwendung
- › Fördert die Wundheilung
- › Kann in Verbindung mit handelsüblichen Produkten der Wundversorgung (z. B. Biatain® Silicone) angewendet werden

HALTBARKEIT	EINWIRKZEIT
3 Jahre nach Herstellung	10 – 15 Minuten

AUFBRAUCHFRIST
3 Monate nach Anbruch (Flasche/Spray), Sofort nach dem Öffnen aufbrauchen (Tuch)



Effektive Reinigung von Belägen mit Allrinse®



Vorher – Die Wunde ist belegt. Die Wundreinigung wird mit Allrinse® durchgeführt.



Nachher – Beläge in der Wunde konnten sichtbar entfernt werden.



## Purilon®

### Zur sanften Auflösung von Nekrosen

Purilon® Gel ist ein klares, amorphes Hydrogel mit Alginatezusatz. Der hohe Wasseranteil von 90% bewirkt eine schnelle Rehydratisierung und Aufweichung trockenen Gewebes. Nekrosen

und Beläge werden schonend abgetragen (autolytisches Débridement), ohne das neu gebildete Gewebe zu schädigen.

#### Indikation

Purilon® Hydrogel ist hauptsächlich bei nekrotischen, belegten und trockenen sekundärheilenden Wunden anzuwenden, wie z. B.

- › Ulcus cruris
- › Dekubitalulcera
- › Brandwunden 1. und 2. Grades

Bei infizierten Wunden kann Purilon® Gel unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Purilon® Gel benötigt immer einen Sekundärverband\*.

#### Produktnutzen

- › Kommt ohne Konservierungsstoffe aus und ist so noch schonender
- › Ermöglicht ein sanftes Débridement
- › Sehr hohe Gelstabilität erleichtert die Applikation und das Anlegen des Sekundärverbands
- › Gel verläuft nicht und schützt so die Wundränder vor Mazeration

\*z. B. Comfeel® Plus Flexibel oder einen Biatain® Schaumverband

## Atrac-Tain®

### Für besonders trockene und brüchige Haut

Atrac-Tain® ist eine Feuchtigkeitscreme zum Schutz vor Austrocknung und Hautrissen bei pflegebedürftiger Haut. Die Creme hat einen 10% Urea- und 4% Laktatanteil und ist mit ihren Eigenschaften optimal auf die Hautsi-

tuation des Diabetischen Fußsyndroms abgestimmt. Atrac-Tain® eignet sich in Kombination mit Wundversorgungsprodukten von Coloplast ebenso zur Pflege und zum Schutz der wundumgebenden Haut.

#### Indikation

Atrac-Tain® wird in Kombination mit Wundversorgungsprodukten zur Pflege, zum Schutz von wundumgebener Haut und zur Prophylaxe trockener Haut angewendet, insbesondere bei

- › Füßen
- › Unterschenkeln
- › Ellenbogen
- › Händen

#### Produktnutzen

- › Spendet trockener und brüchiger Haut Feuchtigkeit (zur Prophylaxe geeignet)
- › Frei von Duft- und Konservierungsstoffen, besonders für sensible Haut geeignet
- › Ureaanteil hydratisiert die Haut und erhöht die Elastizität
- › Laktat wirkt einer Verhornung entgegen
- › Ammoniumionen sorgen für den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut



## InterDry®

### Die effektive Versorgung von Hautfalten


#### Indikation

InterDry® ist für die Verwendung als Hautschutz zur Versorgung von Hautschäden in Hautfalten und/oder anderen Bereichen, in denen Haut auf Haut aufliegt, bestimmt.

Es ist indiziert für die Verwendung auf der Haut zwischen einander berührenden Hautflächen, wo es durch Perspiration und Reibung zu Entzündungen und/oder Reizungen kommt bzw. dies zu erwarten ist. Die Symptome werden auch als Intertrigo bezeichnet.

#### Vorteile

- › Transportiert Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus
- › Minimiert Reibung von Haut-auf-Haut
- › Bekämpft Pilze und Bakterien mit antimikrobiellem Silberkomplex

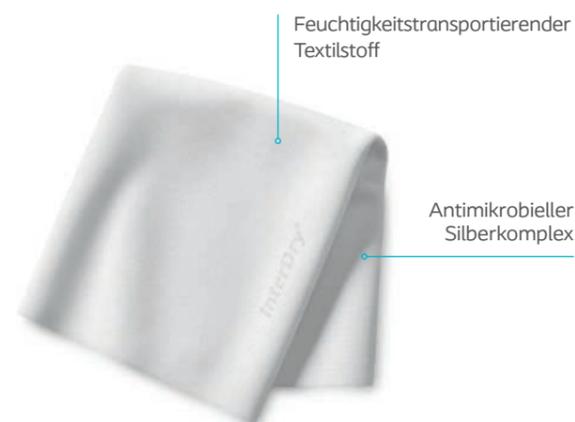

#### Kurzbeschreibung

InterDry® ist ein unsteriler weicher, feuchtigkeitstransportierender Textilstoff mit einem antimikrobiellen Silberkomplex, der auf alle drei Risikofaktoren abzielt, die mit der Schädigung der Hautfalte verbunden sind: Feuchtigkeit, Reibung und Bakterien sowie Pilze.

Der weiche Polyesterstoff leitet die Feuchtigkeit aus der Hautfalte heraus, wo sie dann verdunsten kann. Durch eine einzigartige, patentierte Technologie reduziert InterDry® die Reibung von Haut-auf-Haut.

Zudem enthält InterDry® einen antimikrobiellen Silberkomplex, der ein breites Spektrum an Pilzen und Bakterien, die üblicherweise in Hautfalten vorkommen, über die gesamte Tragedauer von bis zu 5 Tagen bekämpft.



InterDry® sollte mindestens 5 cm aus der Hautfalte herausragen, so dass die Feuchtigkeit verdunsten kann.



Vor der Anwendung von InterDry®: Erythem, Schmerzen, Juckreiz, Geruch



Nach der Anwendung von InterDry®: Fast vollständige Abheilung nach 7 Tagen

#### Produktnutzen

- › Reduziert klinisch nachgewiesene Symptome der Intertrigo innerhalb von wenigen Tagen
- › Schnelle Reduzierung der Symptome steigert die Lebensqualität der Patienten und senkt gleichzeitig die Kosten der Behandlung.
- › Weiches, flexibles Material sorgt für hohen Tragekomfort
- › Einfache Handhabung und Anwendung
- › Zuschneidbar auf die benötigte Größe für die betroffene Hautfalte

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03875348	334343	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	10	3343433
03879292	334353	10 x 10	6,5 x 6,5	10	3343533
11486000	33400	10 x 20	5,5 x 15,5	5	3340003
11486017	33401	10 x 30	5,5 x 25,5	5	3340103
11486075	33408 Multishape	14 x 19,5	7,5 x 12,1	5	3340803
03879702	334363	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	10	3343633
03879731	334373	15 x 15	10,5 x 10,5	5	3343733
03880585	334383	17,5 x 17,5	13 x 13	5	3343833

Biatain® Silicone, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11486023	33404 Sakrum	15 x 19	10,9 x 14	5	3340403
11486052	33405 Sakrum	25 x 25	17 x 17,2	5	3340503
11486069	33406 Ferse	18 x 18	14 x 13,2	5	3340603

Biatain® Silicone Non-Border, mit Silikonhaftung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
16942307	39020	5 x 7,5	10	3902013
16942313	39021	7,5 x 7,5	10	3902113
16942336	39022	10 x 10	10	3902213
16942342	39023	12,5 x 12,5	10	3902313
16942359	39024	10 x 20	5	3902423
16942365	39025	15 x 15	5	3902523
16942371	39026	20 x 20	5	3902623

Biatain® Silicone Lite, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
11485986	33452	5 x 5	2,2 x 2,2	5	3345203
11485992	33453	5 x 12,5	2,2 x 9,7	5	3345303
03880639	334443	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	10	3344433
03880697	334453	10 x 10	6,5 x 6,5	10	3344533
03880705	334463	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	10	3344633

Biatain®, selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04636054	3462	7,5 x 7,5	ø 4 cm	10	3346203
01146898	3420	12,5 x 12,5	8 x 8	10	3342003
00568261	3423	18 x 18	13 x 13	5	3342303

Biatain®, selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01883355	3483 Sakrum	17 x 17	8 x 9	5	3348303
01360373	3485 Sakrum	23 x 23	10 x 11	5	3348503
01532006	3488 Ferse	19 x 20	6 x 6	5	3348803

Biatain®, sanft-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04474166	3470	10 x 10	5	347003
04474172	3472	10 x 20	5	347203
04474189	3475	15 x 15	5	347503

Biatain®, nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06156387	6105	5 x 7	10	3610503
00568232	3410	10 x 10	10	3341003
00953852	3412	10 x 20	5	3341203
00568249	3413	15 x 15	5	3341303
00975546	3416	20 x 20	5	3341603

Biatain®, Cavity



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04032014	3451	5 x 8	10	3345103

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
03880711	396363	7,5 × 7,5	4,5 × 4,5	5	3963633
03880728	396373	10 × 10	6,5 × 6,5	5	3963733
13704518	39644	10 × 20	5,5 × 15,5	5	3964403
13704524	39645	10 × 30	5,5 × 25,5	5	3964503
03880734	396383	12,5 × 12,5	8,5 × 8,5	5	3963833
11033497	396393	15 × 15	10,5 × 10,5	5	396393
03880757	396403	17,5 × 17,5	13 × 13	5	396403

Biatain® Silicone Ag, mit Silikonhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
13704607	39650 Sakrum	15 × 19	10,9 × 14	5	3965003
13704547	39651 Sakrum	25 × 25	17 × 17,2	5	3965103
13704530	39652 Ferse	18 × 18	14 × 13,2	5	3965203

Biatain® Ag, selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06155732	9631	7,5 × 7,5	ø 4 cm	5	3963103
06155695	9632	12,5 × 12,5	8 × 8	5	3963203
06155726	9635	18 × 18	13 × 13	5	9635

Biatain® Ag, selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand, Sakrum/Ferse



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06155933	9641 Sakrum	23 × 23	10 × 11	5	9641
06155962	9643 Ferse	19 × 20	6 × 6	5	9643

Biatain® Ag, nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
06155666	5105	5 × 7	5	3510503
06155028	9622	10 × 10	5	3962203
06155034	9623	10 × 20	5	3962303
06155353	9625	15 × 15	5	3962503
06155399	9626	20 × 20	5	3962603

SCHAUMVERBÄNDE MIT IBUPROFEN

Biatain® Ibu, sanft-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04808532	4140	10 × 10	5	414003
04808561	4142	10 × 20	5	4142

Biatain® Ibu, nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04808331	4110	10 × 10	5	411003
04808348	4112	10 × 20	5	411203
04808354	4115	15 × 15	5	4115
04808526	4120	20 × 20	5	4120

## HYDROKOLLOIDVERBÄNDE

### Comfeel® Plus Flexibel



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342349	33146	4 × 6	10	3314613
—	—	10 × 10	15	331103
12342355	33110	10 × 10	10	3311003
12342361	33115	15 × 15	5	3311503
12342378	33120	20 × 20	5	3312003

### Comfeel® Plus Flexibel, Sakrum



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342384	33285	17 × 17	5	33285

### Comfeel® Plus Contouriert



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342390	33280	6 × 8	5	3328003
12342409	33283	9 × 11	5	3328303

### Comfeel® Plus Transparent



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342415	33530	5 × 7	10	3353003
12342421	335301	5 × 7	50	3353013
12342438	33533	10 × 10	10	3353303
12342444	33536	9 × 14	10	3353603
12342450	33539	15 × 15	5	3353903
12342467	33542	15 × 20	10	3354213
12342473	33547	5 × 15	10	3354703
12342496	33548	5 × 25	10	3354813
12342504	33537	9 × 25	5	3353703

### Comfeel® Plus Druckentlastend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
12342510	33350	7 (2-4) <sup>I</sup>	10	33350
12342527	33353	10 (3-6) <sup>II</sup>	10	33353
12342533	33356	15 (5-9) <sup>III</sup>	10	33356

I Schmetterlingsform (2-4 cm Druckentlastung)  
 II runde Form (3-6 cm Druckentlastung)  
 III runde Form (5-9 cm Druckentlastung)

## SUPERABSORBER

### Biatain® Super, selbst-haftend, mit Hydrokolloidhafrand



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01402947	4610	10 × 10	5 × 5	10	461003
01403065	4612	12,5 × 12,5	7 × 7	10	461203
01403510	4625	12 × 20	6 × 14	10	462503
01403496	4615	15 × 15	8 × 8	10	461503
01403527	4620	20 × 20	11 × 11	10	462003

### Biatain® Super, nicht-haftend



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	Schaumkissen/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01403533	4630	10 × 10	5 × 5	10	463003
01404277	4632	12,5 × 12,5	7 × 7	10	463203
01404981	4645	12 × 20	6 × 14	10	464503
01404975	4635	15 × 15	8 × 8	10	463503
01406342	4639	20 × 20	11 × 11	10	463903

## GELBILDENDER FASERVERBAND

### Biatain® Fiber



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15628543	33502	5 × 6	10	33502
15628566	33504	10 × 12	10	33504
15628595	33506	15 × 15	5	33506
15628603	33507	19 × 25	5	33507
15628632	33508	2,5 × 46 Tamponade	10	33508

## ALGINATVERBÄNDE OHNE/MIT SILBER

### Biatain® Alginate



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406388	37053	5 × 5	10	370533
01406365	3705	5 × 5	30	370523
01406394	3710	10 × 10	10	371023
01406419	3715	15 × 15	10	371523
01406425	3740	3 × 44 Tamponade	5	374033

### Biatain® Alginate Ag



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01406448	37551	5 × 5	10	375513
01406431	3755	5 × 5	30	375503
01406833	3760	10 × 10	10	376003
01406856	3765	15 × 15	10	376503
01406885	3780	3 × 44 Tamponade	10	378003

## WUNDKONTAKTAUFLAGE

### Biatain® Contact, silikonbeschichtet



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15628715	33560-0	5 × 7,5	10	33560-0
15628721	33560-2	5 × 7,5 Spenderbox	60	—
15628738	33561-0	7,5 × 10	10	33561-0
15628744	33561-2	7,5 × 10 Spenderbox	60	—
15628750	33562-0	10 × 18	10	33562-0
15628767	33563-0	15 × 25	5	33563-0
15628773	33564-0	18 × 30	5	33564-0

## WUNDSPÜLLÖSUNG

### Allrinse® Wundspüllösung



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
17438195	4792	Spray à 75 ml	1	4792
17438189	4790	Fl. à 350 ml	1	4790
19213371	4791	Spray à 500 ml* <b>NEU</b>	1	4791

## TEXTILSTOFF ZUR HAUTFALTENVERSORGUNG

### InterDry®, mit Silberkomplex



PZN	Handel Artikel-Nr.	Größe/cm	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
15994354	67918	25 × 366 Rolle	1	67918
15994360	67919	25 × 91	10	67919

## HYDROGEL UND HAUTSCHUTZ

### Purilon® Gel



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
00951356	3906	8 g	10	390603
08753555	3900	15 g	10	390003
08753549	3903	25 g	10	3903

### Atrac-Tain®, Feuchtigkeitscreme



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
01215725 <sup>v</sup>	—	Tube à 75 ml	1	—
01215731	4738	Tube à 75 ml	12	4738

### Schutzcreme



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
04803457	4720	Tube à 60 ml	6	4720
		HMV-Nr.		Tube: 29.26.10.0002

### Reinigungs lotion



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
08872018	4710	Fl. à 180 ml	6	4710
03435661	4715	Tücher	30	4715
		HMV-Nr.		Flasche: 29.26.10.3002 Tücher: 29.26.10.2001

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
09543699	12010	Fl. à 50 ml	1	12010
09543707	12011	Tücher	30	12011

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher



PZN	Handel Artikel-Nr.	Inhalt	St./VE	Klinik Artikel-Nr.
09543736	12020	Fl. à 50 ml	1	12020
09543713	12021	Tücher	30	12021

- leicht
- leicht – mittel
- leicht – stark
- mittel – stark
- leicht – sehr stark
- Antimikrobiell
- Zuschneidbar
- Wasserfest
- Fixierung nötig
- Sekundärverband nötig

€ Selbstzahler-Produkt oder ggf. nach Kostenvoranschlag, Artikel mit HMV-Nr. sind erstattungsfähig in der Produktgruppe 29 (Stomaartikel).

Alle Verbandmittel der Coloplast GmbH sind derzeit als Einzelverordnung zu Lasten der GKV verordnungs- und erstattungsfähig. Bis zum Ende der Übergangsfrist, dem 2. Dezember 2024, gilt dies auch für unsere Produkte, die vermutlich als »Sonstige Produkte zur Wundversorgung« (silber- und ibuprofenhaltige Verbände, Hydrogele) einzustufen sind. Ein Antrag auf Weiterführung der Erstattung beim G-BA wird gestellt.

Stand: August 2023

# Lokale Therapie in der Wundversorgung

**Infizierte Wunde** Mäßig – Stark

**WUNDBILD**

**BEHANDLUNGSZIEL**

**Exsudatmanagement**  
Optimal feuchtes Wundmilieu

+

**Keimabtötung**  
Lokale Antiseptika, antimikrobielle Therapie

**REINIGUNG**

Wundspülung **Allrinse®**

Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Alginate Ag**

+

Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge

**PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm**

**Biatain® Silicone Ag** **Biatain® Ag nicht-/selbst-haftend**

**PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm**

**Biatain® Alginate Ag** **Biatain® Silicone oder Biatain® nicht-/selbst-haftend**

**Nicht-infizierte Wunde** Mäßig – Stark

**WUNDBILD**

**BEHANDLUNGSZIEL**

**Exsudatmanagement**  
Optimal feuchtes Wundmilieu

+

**Keimreduktion**  
Keimbindende und reduzierende Therapie, Wundspülung

+

**Gewebeaufbau**  
Wundruhe

**REINIGUNG**

Wundspülung **Allrinse®**

Zusätzlich bei stark belegten Wunden: **Biatain® Fiber oder Biatain® Alginate**

+

Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge

**PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE 0 – 2 cm**

**Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border** **Biatain® nicht-/selbst-haftend**

**Biatain® Contact**

+

Stark absorbierenden Sekundärverband

**PRODUKTEMPFEHLUNG WUNDTIEFE > 2 cm**

**Biatain® Fiber oder Biatain® Alginate** **Biatain® Silicone oder Biatain® Silicone Non-Border oder Biatain® nicht-/selbst-haftend**

**Nicht-infizierte Wunde/Akutwunde** Leicht

**WUNDBILD**

**BEHANDLUNGSZIEL**

**Exsudatmanagement**  
Optimal feuchtes Wundmilieu

+

**Epithelisierung**  
Wundruhe/ Gewebeschutz

**REINIGUNG**

Wundspülung **Allrinse®**

Zur Rehydrierung **Purilon® Gel**

**PRODUKTEMPFEHLUNG**

**Biatain® Silicone Lite** **Biatain® Contact**

**Comfeel® Plus/Comfeel® Plus Transparent**

\* Sekundärverband in Abhängigkeit der Exsudatmenge erforderlich



## Fragen zur Wundversorgung?

### Ask Coloplast\_

Ihre Möglichkeit für einen fachlichen Austausch zur Indikation, Anwendung und Verbandauswahl rund um unsere Coloplast-Produkte.



[askcoloplast.de](http://askcoloplast.de)



[de\\_ask@coloplast.com](mailto:de_ask@coloplast.com)



0800 – 516 70 20



## Die Online Wissensplattform

Coloplast® Professionals – für eine bessere Patientenversorgung

### Weiterbildung für Pflegekräfte

Durch den kontinuierlichen Dialog mit Fachkräften und Patienten möchte Coloplast Wissen über Produkte, Behandlungen und Prozesse teilen und somit die Handlungskompetenz im Bereich der Wundversorgung ausbauen.

Coloplast® Professional ermöglicht Ihnen nicht nur die Teilnahme an zielgruppenspezifischen Präsenz- und Online-Seminaren, sondern fördert gleichzeitig einen intensiven Austausch unter Fachleuten verschiedener Arbeitsbereiche.

Auf unserer Website für Fachkräfte können Sie das aktuelle Programm ansehen und sich direkt dafür anmelden.

[www.coloplastprofessional.de](http://www.coloplastprofessional.de)  
› Wundversorgung › Fortbildung

### Fort- und Weiterbildung

Online lernen – unabhängig von Zeit und Ort – um sich damit exzellentes Fachwissen für den Arbeitsalltag anzueignen.

Das bietet das Coloplast E-Learning-Programm »Healthcare Excellence through Access and Learning«, kurz HEAL. Die Online-Plattform wurde gemeinsam mit Experten aus aller Welt entwickelt und bietet Lernmodule zur Wundversorgung.

# HEAL

Mehr auf [www.coloplastprofessional.de](http://www.coloplastprofessional.de)  
› Wundversorgung › Fortbildung › HEAL



## Notizen

## Mehr Wissen für Sie

### *Klinische Expertise für Ärzte*

Auf unserer Evidenz-Seite haben wir für Sie unabhängige wissenschaftliche Daten aufbereitet. Hier erwarten Sie neue wissenschaftliche Publikationen und Fallstudien zu verschiedenen Indikationen.

Unsere anschaulichen klinischen Videos komplettieren unser Angebot zum Thema Evidenz.

[www.coloplastprofessional.de](http://www.coloplastprofessional.de)  
› Wundversorgung › Evidenz

### *Wirtschaftlichkeit für die Praxis*

Unter der Rubrik »Informationen für Ärzte« bieten wir Ihnen Informationen zur Kodierung und Abrechnung nach DGRs, zum EDM sowie zur Regressprophylaxe.

Außerdem finden Sie eine Übersicht zur Anerkennung von Coloplast Wundversorgungsprodukten beim Sprechstundenbedarf und weitere Informationen zu diesem Thema.

[www.coloplastprofessional.de](http://www.coloplastprofessional.de)  
› Wundversorgung › Informationen für Ärzte

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwendern finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an. Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.