


Einziehen von Ohrmarken bei Schafen und Ziegen

Für das sichere Einziehen der Allflex-Ohrmarken empfehlen wir Ihnen die Ohrmarkenzange von Allflex.

Das Markieren von Tieren ist ein kleiner chirurgischer Eingriff, bei dem besondere Vorsicht geboten ist und einige Regeln beachtet werden müssen. Ansonsten kann es unter Umständen zu Wundinfektionen kommen. Bei der Markierung sollten daher folgende Massnahmen beachtet werden:


Markierung von Jungtieren

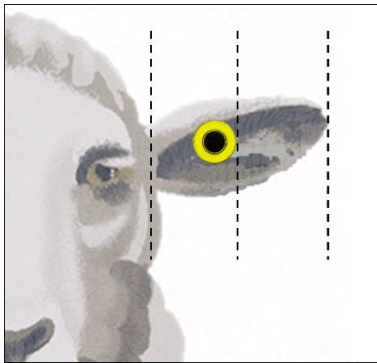

- > Tiere gut fixieren.
- > Platzieren Sie die Ohrmarke mittig zwischen den Knorpelsträngen.
- > Achten Sie darauf, dass die Ohrmarke nicht zu nahe am Kopf eingezogen wird.
- > Drücken Sie die Zange nach dem Platzieren der Ohrmarken zügig und kräftig zusammen.
- > Drehen Sie das Lochteil und Dornteil der Ohrmarke im Ohr gegeneinander.
- > Einstichstelle desinfizieren.

Wenn die Tiere nicht gut fixiert werden und nach dem Markieren den Kopf abrupt zurückziehen, kann es zu Verletzungen bei der Einstichstelle kommen.

Nach- und Ummarkierung von ausgewachsenen Tieren

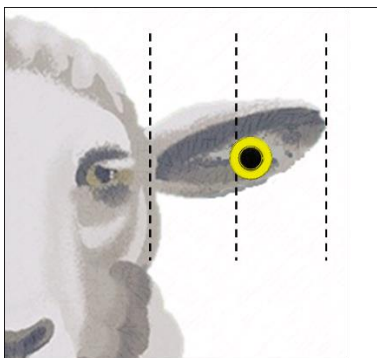

- > Die Markierung erfolgt grundsätzlich wie bei Jungtieren, nur dass Sie die Ohrmarke weiter aussen ansetzen sollten.
- > Die Ohren von ausgewachsenen Tieren sind dicker. Wenn die Ohrmarken nahe am Kopf eingesetzt werden, schliessen sie zu eng und können zum Absterben des Gewebes führen.
- > Die Ohrmarken sollten daher bei ausgewachsenen Tieren möglichst weit aussen eingezogen werden (mindestens 1/2 bis 2/3 von der Ohrbasis ausgehend).

Nach der Markierung sollten in regelmässigen Abständen Nachkontrollen durchgeführt werden. Im Falle von lokalen Reaktionen reinigen und desinfizieren Sie die Wunde umgehend.